


**LifeCare**  
by **iRest**

## **A602-2 ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΜΑΣΑΖ**

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

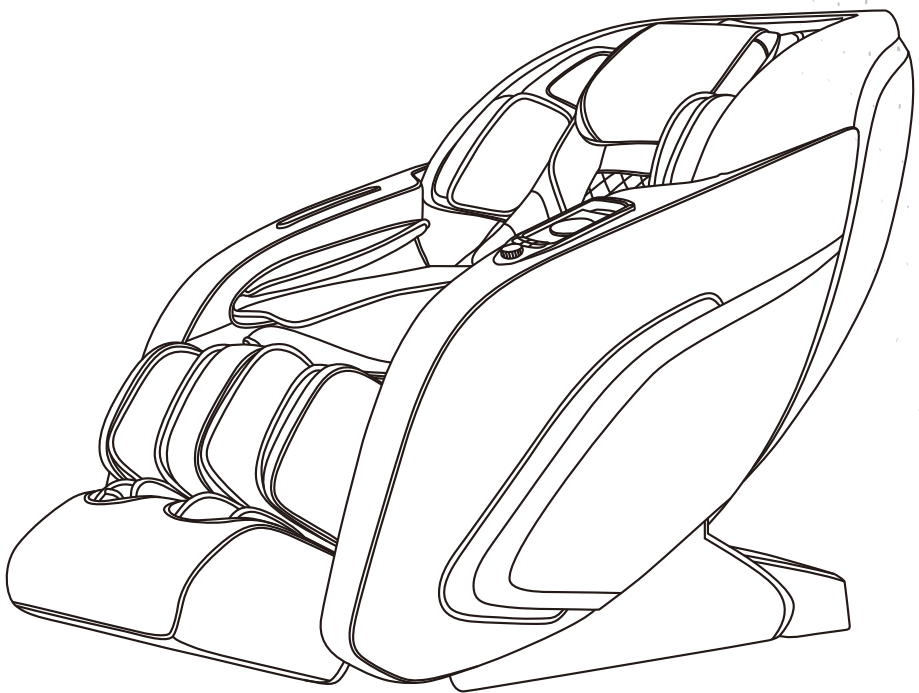



Ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν. Παρακαλούμε διαβάστε τις οδηγίες του εγχειριδίου προσεκτικά προκειμένου να γνωρίζετε πως να χρησιμοποιήσετε σωστά το προϊόν πριν από τη χρήση. Παρακαλούμε δώστε προσοχή στις ειδοποιήσεις ασφαλείας. Διατηρήστε το εγχειρίδιο χρήσης και για μελλοντική αναφορά.

Σημείωση: Η εταιρεία μας διατηρεί κάθε δικαίωμα να αλλάξει το σχεδιασμό του προϊόντος, χωρίς πρότερη ειδοποίηση. Οποιαδήποτε διαφοροποίηση σε οπτικό ή τεχνολογικό επίπεδο αναφορικά με το προϊόν, οφείλεται σε αναβάθμιση του προϊόντος και η εταιρεία δεν οφείλει να ενημερώσει.

Το χρώμα και οι λειτουργίες του προϊόντος μπορεί να διαφέρουν.

## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

---

Ασφάλεια και Συντήρηση	02-03
Προειδοποιήσεις Ασφαλείας	04-06
Όνομα και σκοπός των μερών	07
Λειτουργία	08-09
Λειτουργία Χειριστηρίου	10-11
Τρόπος Χρήσης	12-36
I. Ενεργοποίηση της παροχής ενέργειας	12
II. Χειρισμός Τηλεχειριστηρίου Λειτουργιών Μασάζ	12-28
III. Εισαγωγή στα Πλήκτρα Ελέγχου Υποβραχιόνιου	29-30
IV. Λειτουργία φωνητικού ελέγχου	31
V. Οδηγίες λειτουργίας για αναπαραγωγή σε ηχεία Bluetooth	32
VI. Απενεργοποίηση και παύση του μασάζ	32
VII. Οδηγίες τοποθέτησης υποβραχιόνων	32-33
VIII. Οδηγίες τοποθέτησης υποπόδιου	34
IX. Οδηγίες Αφαίρεσης και Χρήσης Μαξιλαριού Κεφαλής και Πλάτης	35
X. Προστασία Δαπέδου	35
XI. Οδηγίες Μετακίνησης	36
Προδιαγραφές Προϊόντος	37
Περιορισμένη Εγγύηση	38

## Ασφάλεια και Συντήρηση

---

### 1. Σημαντικές Προφυλάξεις Ασφαλείας



- Μην επιτρέπετε σε παιδιά να αγγίζουν κινούμενα μέρη του προϊόντος.
  - Χρησιμοποιήστε μια καλά γειωμένη παροχή ρεύματος, κατάλληλη για αυτό το προϊόν.
  - Αφαιρέστε το καλώδιο παροχής ρεύματος από την πρίζα μετά το πέρας της χρήσης ή πριν το καθάρισμό του προϊόντος προκειμένου να αποφύγετε σωματική βλάβη ή βλάβη στο προϊόν.
  - Χρησιμοποιήστε το προϊόν με βάση τις οδηγίες του εγχειριδίου.
  - Μην χρησιμοποιείτε προσαρτήματα ή μέρη τα οποία δεν συνίστανται.
  - Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σε εξωτερικούς χώρους.
  - Πριν την πρώτη χρήση διαβάστε προσεκτικά τις Οδηγίες Χρήσης.
  - Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν για κανένα άλλο λόγο πέραν του προκαθορισμένου.
  - Συστήνεται χρήση 20 λεπτών τη φορά.
  - Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν εάν το κάλυμμα ή η ταπετσαρία έχει υποστεί φθορά.
  - Μην ρίχνετε τίποτα πάνω στο προϊόν.
  - Μην κοιμάστε ενώ χρησιμοποιείται τον προϊόν.
  - Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν είστε υπο την επήρεια αλκοόλ ή εάν δεν αισθάνεστε καλά.
  - Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν έως και μία ώρα μετά από το γεύμα.
  - Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν πέραν του συνιστώμενου χρόνου ή/και με υπερβολική δύναμη, προκειμένου να αποφύγετε οποιοδήποτε τραυματισμό.
- Αφαιρέστε από τις τσέπες σας οποιοδήποτε εύθραυστο, ασταθές ή εύφλεκτο αντικείμενο, όπως το κινητό σας τηλέφωνο ή/και αναπτήρα όταν χρησιμοποιείτε την πολυθρόνα massage.

### 2. Περιβάλλον λειτουργίας

- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε περιβάλλον με υγρασία, π.χ. το μπάνιο.
- Σταματήστε τη χρήση όταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος μεταβληθεί απότομα.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε χώρο με πολλή σκόνη ή όπου υπάρχουν καυστικά υλικά.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε περιβάλλον όπου ο χώρος δεν αερίζεται σωστά.
- Η ιδανική θερμοκρασία του δωματίου πρέπει να κυμαίνεται από 10°C έως 35°C.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε περιβάλλον με υπερβολική υγρασία, π.χ. το μπάνιο. Τα ιδανικά ποσοστά υγρασίας είναι από 20% έως 80%.
- Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σε εξωτερικούς χώρους.
- Αποφύγετε την άμεση έκθεση του προϊόντος στον ήλιο.
- Κρατήστε το προϊόν μακριά από πηγές θερμότητας όπως π.χ. σόμπες, Air Condition κ.λπ.
- Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σε ημέρες όπου επικρατούν ακραία καιρικά φαινόμενα, π.χ. κεραυνοί και αστραπές.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε χώρο με πολλούς ρύπους.

### 3. Σύσταση μη χρήσης της πολυθρόνας από τις κάτωθι ευπαθείς ομάδες:

- Ασθενείς που πάσχουν από οστεοπόρωση.
- Ασθενείς που πάσχουν από κάποιο καρδιολογικό νόσημα ή έχουν βηματοδότη.
- Ασθενείς σε εμπύρετη κατάσταση.
- Γυναίκες που κυοφορούν ή βρίσκονται σε μέρες εμμήνου ρύσεως.
- Ασθενείς που είναι τραυματισμένοι ή πάσχουν από δερματικά νοσήματα.
- Τα παιδιά που είναι σε ηλικία κάτω των 14 ετών, δεν πρέπει να χρησιμοποιούν αυτό το προϊόν χωρίς συνεχή επίβλεψη από ενήλικα.
- Χρήστες που έχουν ιατρική σύσταση να αναπαυτούν ή ασθενείς που δεν αισθάνονται καλά.
- Χρήστες των οποίων τα σώματα είναι υγρά, απαγορεύεται να χρησιμοποιήσουν το προϊόν.
- Αυτό το προϊόν είναι εξοπλισμένο ώστε να παρέχει θερμότητα. Άτομα με ευαισθησία στη ζέση πρέπει να είναι πολύ προσεκτικά, όταν χρησιμοποιούν αυτό το προϊόν.

## Ασφάλεια και Συντήρηση

---

### 4. Προειδοποιήσεις Ασφαλείας

- Ελέγξτε εάν η τάση του ρεύματος είναι συμβατή με τα χαρακτηριστικά του προϊόντος.
- Ποτέ μην εισάγετε ή εξάγετε το φις του καλωδίου παροχής ρεύματος με βρεγμένα χέρια.
- Μην ρίχνετε νερό πάνω σε αυτό το προϊόν για να αποφύγετε το ηλεκτρικό σοκ ή/και την πρόκληση φθοράς.
- Μην τραβάτε το καλώδιο παροχής ρεύματος εάν το προϊόν είναι συνδεδεμένο στην πρίζα. Η απότομη απομάκρυνση του φις απαγορεύεται.
- Μην αλλάζετε το καλώδιο ή τροποποιείται το ηλεκτρικό κύκλωμα.
- Μην καθαρίζετε το προϊόν με βρεγμένο πανί, ενώ είναι στην πρίζα και ο διακόπτης ανοικτός.
- Απομακρυνθείτε από το προϊόν σε περίπτωση προβλήματος με την παροχή ρεύματος, για να αποφύγετε τυχόν τραυματισμό, έως ότου να αποκατασταθεί το πρόβλημα.
- Σταματήστε να χρησιμοποιείτε το προϊόν άμεσα εάν εντοπίσετε δυσλειτουργία.
- Σταματήστε τη χρήση του προϊόντος εάν νιώσετε αδιαθεσία, και συμβουλευτείτε ένα γιατρό.
- Αυτό το προϊόν δεν συνιστάται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένη φυσική, νοητική ή αισθητηριακή ανάπτυξη, ή άτομα με ελλείψεις γνώσεις και εμπειρία, εκτός εάν υπάρχει επίβλεψη ή καθοδήγηση από άτομα υπεύθυνα για την ασφάλειά τους. Το παρόν προϊόν δεν είναι παιχνίδι! Τα παιδιά θα πρέπει να είναι υπό συνεχή επίβλεψη.
- Εάν το καλώδιο έχει υποστεί οποιαδήποτε φθορά, πρέπει να αντικατασταθεί άμεσα από τον κατασκευαστή ή το εξουσιοδοτημένο service.

### 5. Επισκευή και Συντήρηση

- Αυτό το προϊόν πρέπει να ελεγχθεί σε οποιαδήποτε περίπτωση από το εξουσιοδοτημένο τεχνικό τμήμα. Ο χρήστης δεν πρέπει να αποσυναρμολογεί ή να το συντηρεί.
- Μην ξεχνάτε να κλείνετε το διακόπτη (power off) μετά από τη χρήση.
- Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν εάν η πρίζα είναι χαλαρή.
- Εάν το προϊόν δεν χρησιμοποιηθεί για αρκετά μεγάλη χρονική περίοδο, αφαιρέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα και από την πολυθρόνα massage και αποθηκεύστε την σε ένα στεγνό και χωρίς σκόνη μέρος.
- Μην αποθηκεύετε αυτό το προϊόν σε μέρη με υψηλή θερμοκρασία ή κοντά σε μέρη όπου υπάρχει φωτιά. Αποφύγετε τη παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο.
- Καθαρίστε αυτό το προϊόν με στεγνό πανί. Μην χρησιμοποιείτε χημικά, βενζίνη ή αλκοόλ.
- Οι μηχανικοί σύνδεσμοι του προϊόντος είναι ειδικά σχεδιασμένοι και κατασκευασμένοι, έτσι δεν χρειάζονται ειδική συντήρηση.
- Μην σπρώχνετε ή τραβάτε αυτό το προϊόν σε ανώμαλες επιφάνειες. Για να μετακινηθεί σε ανώμαλες επιφάνειες, επιλέξτε να το σηκώσετε.
- Χρησιμοποιήστε αυτό το προϊόν συνετά. Μην το λειτουργείτε παρατεταμένα.

### 6. Επίλυση απλών προβλημάτων

- Υπάρχει ήπιος θόρυβος που οφείλεται στη λειτουργία του κινητήρα.
- Εάν το χειριστήριο δεν λειτουργεί κανονικά, ελέγξτε εάν η σύνδεση παροχής ρεύματος είναι σωστή και εάν το πλήκτρο Switch On/Off είναι ενεργοποιημένο.
- Όταν ο χρόνος του προγράμματος έχει ολοκληρωθεί, η πολυθρόνα massage θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Εάν το προϊόν λειτουργεί για μεγάλο χρονικό, η θερμοκρασία θερμοστάτη θα αυξηθεί και το προϊόν θα σταματήσει αυτόματα να λειτουργεί. Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά έπειτα από μισή ώρα.

### 7. Συνθήκες αποθήκευσης


- Θερμοκρασία δωματίου αποθήκευσης: -5° C έως 35° C.
- Σχετική υγρασία (RH) μεταξύ 20% και 80%. Χωρίς διαβρωτικά αέρια και πολύ καλά αεριζόμενο χώρο.

## Ειδοποιήσεις Ασφαλείας

---


### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Όταν το υποπόδιο της πολυθρόνας μασάζ είναι σηκωμένο, δεν πρέπει κανείς να ασκεί πίεση στο υποπόδιο, για να αποτρέψετε την πτώση της καρέκλας μασάζ προς τα εμπρός, κάτι που μπορεί να το καταστρέψει προϋόν ή να οδηγήσει σε προσωπικούς τραυματισμούς.

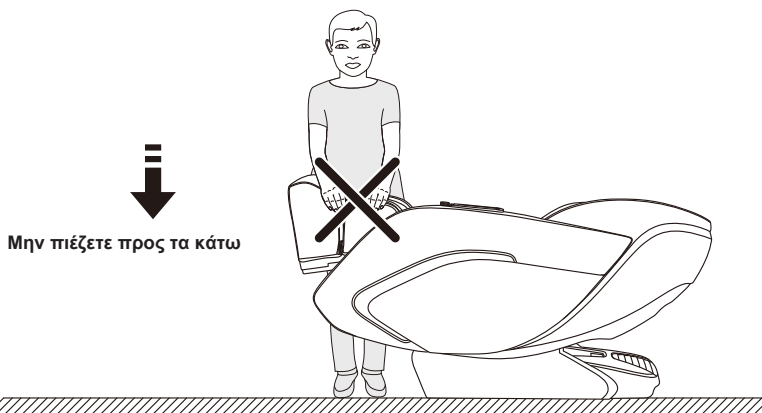

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Όταν καθίσετε στην πολυθρόνα μασάζ, βεβαιωθείτε ότι ο χρήστης της πολυθρόνας δεν είναι καθισμένος για μεγάλο χρονικό διάστημα προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε ταλαιπωρία στους γλουτούς εξαιτίας της αυξημένης πίεσης.

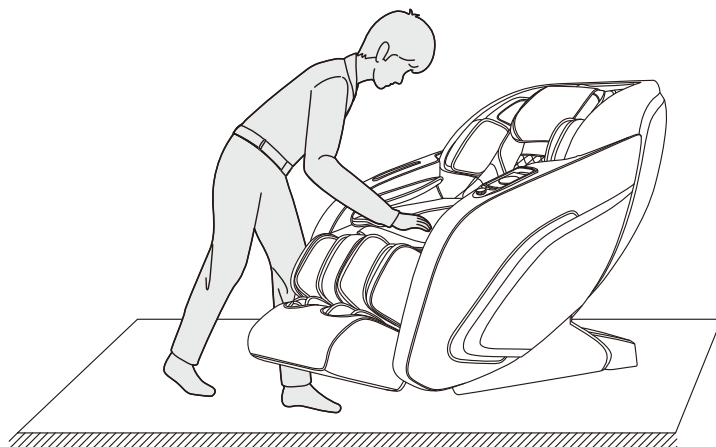


## Ειδοποιήσεις Ασφαλείας

---


### ⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην αφαιρείτε ή τραβάτε το καλώδιο παροχής ρεύματος και το καλώδιο του χειριστήριου όταν η πολυθρόνα είναι σε κατάσταση αναμονής ή είναι σε λειτουργία, καθώς αυτή η ενέργεια μπορεί να προκαλέσει φθορά στο προϊόν ή ηλεκτρικό σοκ. Συνιστάται η αποσύνδεση των καλωδίων από την πολυθρόνα και από την πρίζα, όταν η πολυθρόνα μασάζ δεν χρησιμοποιείται.

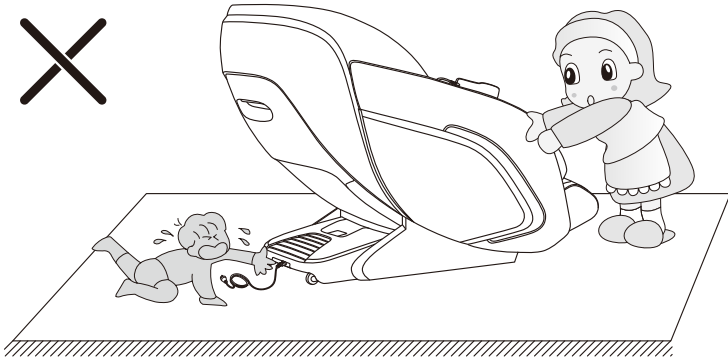

### ⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Όταν η πολυθρόνα μασάζ βρίσκεται σε λειτουργία μηδενικής βαρύτητας, βεβαιωθείτε ότι δεν βρίσκονται στο χώρο παιδιά ή κατοικίδια, τα οποία μπορεί να παίξουν ή να στέκονται στο εμπρόσθιο ή οπίσθιο μέρος της πολυθρόνας μασάζ, προκειμένου να αποφευχθεί οποιοσδήποτε φυσικός τραυματισμός ή φθορά στο προϊόν.

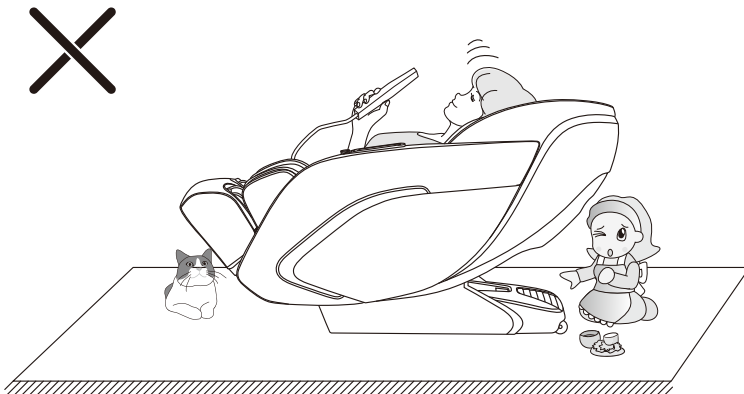


## Ειδοποιήσεις Ασφαλείας

---


### ⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Πριν χρησιμοποιήσετε την πολυθρόνα μασάζ αφαιρέστε οποιοδήποτε αιχμηρό αντικείμενο από τις τσέπες σας ή οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο για να αποφύγετε οποιοδήποτε τραυματισμό δικό σας ή την πρόκληση φθοράς στο προϊόν.

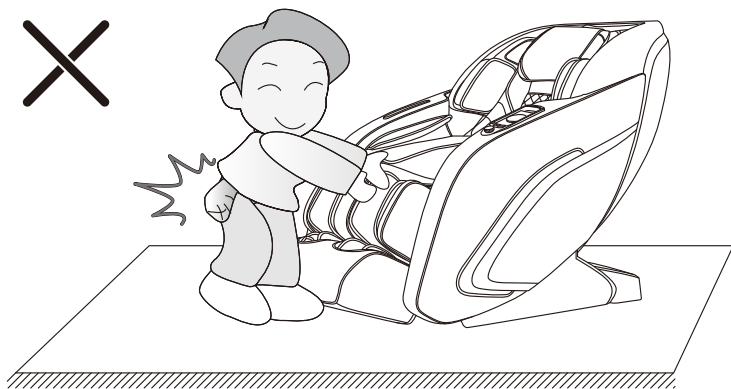



### ⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην αφαιρείται το καλώδιο παροχής ρεύματος από την πρίζα ή/και κλείνετε το διακόπτη (power switch- OFF) στο πίσω μέρος της πολυθρόνας, κατά τη διάρκεια της χρήσης, προκειμένου να αποφύγετε πρόκληση ζημιάς στην πολυθρόνα.

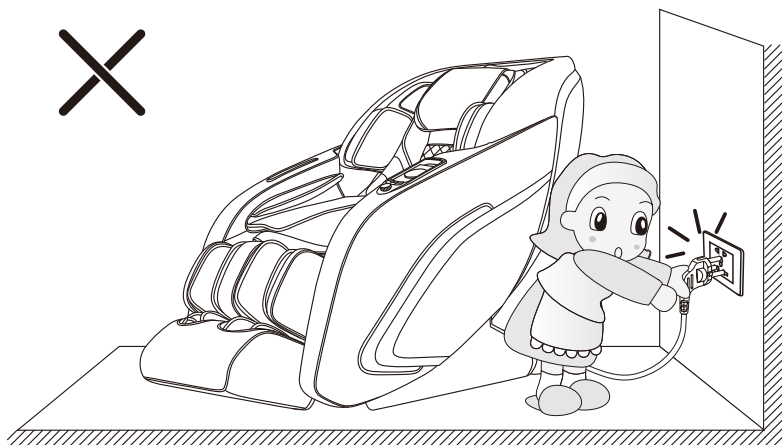



## Όνομα και Σκοπός Μερών

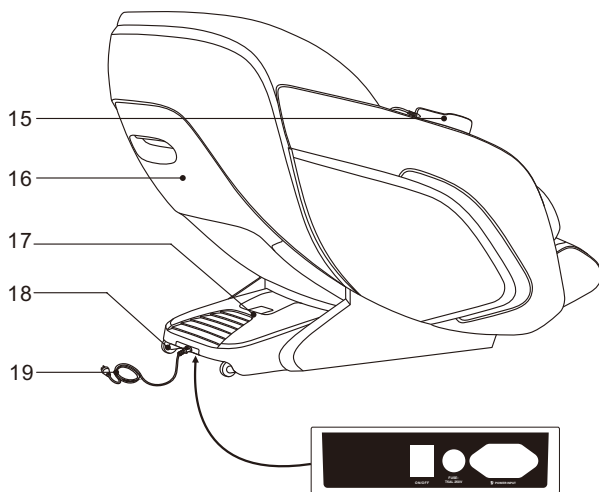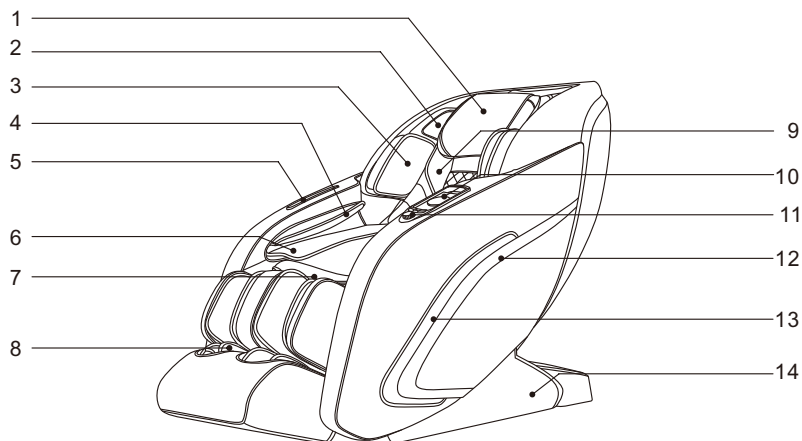

1. Μαξιλάρι αυχένα
2. 3D ψηφιακός ήχος
3. Αερόσακος άνω βραχίονα
4. Αερόσακος βραχίονα
5. Υποδοχή για το χειριστήριο
6. Υποδοχή χειρών για μαγνητική θεραπεία
7. Υποπόδιο
8. Υποδοχή πελμάτων
9. Μαξιλάρι πλάτης
10. Ασύρματος φορτιστής τηλεφώνου
11. Πλήκτρο συντόμευσης υποβραχιόνιου
12. Υποβραχιόνιο
13. Λυχνία LED
14. Πλαϊνό κάλυμμα
15. Χειριστήριο
- 16.Κάλυμμα πλάτης
- 17.Πίσω κάλυμμα
- 18.Ρόδες μεταφοράς
- 19.Καλώδιο τροφοδοσίας
- 20.Κεντρικός διακόπτης
- 21.Κεντρική ασφάλεια
- 22.Υποδοχή τροφοδοσίας

20 21 22

## Λειτουργίες

---

- Αυτό το προϊόν είναι σχεδιασμένο με ένα σετ τρισδιάστατων (3D) οδηγιών μασάζ οι οποίοι κινούνται αθόρυβα ανοδικά και καθοδικά και από πίσω προς τα εμπρός.
- Είναι σχεδιασμένο με τις λειτουργίες αυτόματης ανίχνευσης και μικρορύθμισης της θέσης ώμου και αυτόματης ανίχνευσης της καμπύλης του ανθρώπινου σώματος και σημείων μασάζ shiatsu. Επομένως, σύμφωνα με την ανιχνευμένη καμπύλη του σώματος και σημεία μασάζ shiats, μπορεί να ρυθμίσει αυτόματα τους οδηγούς να εκτείνονται από μπροστά προς τα πίσω, κάνοντας το μασάζ πιο φιλικό προς τον χρήστη και επιστημονικό.
- Υπάρχουν 21 αυτόματες, ειδικές λειτουργίες massage, π.χ.: fast massage(γρήγορο μασάζ), comfort massage(χαλαρό μασάζ), relaxing massage (χαλαρωτικό μασάζ), stretching massage, full body massage (μασάζ ολόκληρου του σώματος), neck and shoulder massage (μασάζ αυχένα & ώμου), back & waist massage (massage πλάτης & μέσης), full airbag massage (πλήρες μασάζ αερόσακων), Stress relieving (μασάζ ανακούφισης από το στρες), Energy (μασάζ ενέργειας), Good-night sleep (μασάζ βελτίωσης ύπνου), Joint care (μασάζ φροντίδας αρθρώσεων), Spine massage (μασάζ σπονδυλικής στήλης), Office regimen (μασάζ αποσυμφόρησης καθιστικής εργασίας), Sport recovery (μασάζ αθλητικής αποθεραπείας), Neck & shoulder care (μασάζ φροντίδας αυχένα & ώμου), Brain refresh (μασάζ αναζωογόνησης εγκεφάλου), Spine care (μασάζ φροντίδας σπονδυλικής στήλης), Waist care (μασάζ φροντίδας μέσης), Leg care (μασάζ φροντίδας ποδιών) και Rejuvenation (μασάζ αναζωογόνησης).
- Υπάρχουν 5 έξυπνες λειτουργίες μνήμης (M1, M2, M3, M4, M5): Αντιστοιχούν σε αποθηκευμένες λειτουργίες μασάζ και διαθέσιμες τεχνικές για 5 χρήστες (πχ.πατέρας, μητέρα, κόρη, γιος ή κανένας).
- Για τους οδηγούς υπάρχει διαθέσιμο εύρος επιλογής χειροκίνητου μασάζ: συμπεριλαμβάνονται 5 επιλογές μασάζ (π.χ. πλήρες εύρος, τοπικό, σταθερό σημείο, άνω πλάτη, κάτω πλάτη).
- Επιλογές χειροκίνητης λειτουργίας μασάζ διαθέσιμες για τους οδηγούς: 11 διαθέσιμες τεχνικές μασάζ, συμπεριλαμβανομένου Kneading (7 λειτουργίες kneading με δυναμτική κυκλική εναλλαγή), tapping (Tapping I, Tapping II), ταυτόχρονο kneading και tapping, shiatsu (Shiatsu I, Shiatsu II), shoulder lifting (ανασήκωση ώμου), 3D (3D I, 3D II, 3D III, 3D IV), κλπ.
- Ρύθμιση λειτουργίας μασάζ: Είναι διαθέσιμες 7 λειτουργίες ρύθμισης μασάζ, συμπεριλαμβανομένων 5 επιπέδων ταχύτητας για ρύθμιση μασάζ πλάτης, 5 επίπεδα έντασης για ρύθμιση μασάζ πλάτης, 5 επίπεδα εύρους ρύθμισης μασάζ, 5 επίπεδα πλάτους για ρύθμιση μασάζ, 5 επίπεδα έντασης για ρύθμιση αερόσακων, 3 επίπεδα ταχύτητας για ρύθμιση κυλίνδρων κύλισης, 4 επίπεδα χρόνου για ρύθμιση μασάζ.
- Λειτουργία μασάζ αερόσακων για το άνω μέρος του σώματος: λειτουργία μασάζ αερόσακων για τα χέρια (8 ενσωματωμένοι αερόσακοι), λειτουργία μασάζ αερόσακων για τους ώμους (2 ενσωματωμένοι αερόσακοι) και 5 επίπεδα έντασης για ρύθμιση των αερόσακων.
- Λειτουργία μασάζ αερόσακων για το κάτω μέρος του σώματος: λειτουργία μασάζ αερόσακων για το πάνω μέρος των ποδιών (6 ενσωματωμένοι αερόσακοι), λειτουργία μασάζ αερόσακων για το κάτω μέρος των ποδιών (22 ενσωματωμένοι αερόσακοι) και 5 επίπεδα έντασης για ρύθμιση των αερόσακων.
- Το προϊόν διαθέτει λειτουργία θέρμανσης πλάτης: Οι ίνες άνθρακα χρησιμοποιούνται ως απομακρυσμένη πηγή θερμότητας υπέρυθρης ακτινοβολίας.
- Η τεχνολογία συρόμενης ράγας για την πλάτη του καθίσματος εξασφαλίζει μηδενικό χώρο μεταξύ της πλάτης και του τοίχου, έτσι ώστε να εξοικονομείται ο χώρος στο μέγιστο δυνατό βαθμό.
- Ο οδηγός της πλάτης του καθίσματος υιοθετεί την τεχνολογία οδηγού καμπύλης, ώστε να ταιριάζει απόλυτα στην καμπύλη της ανθρώπινης πλάτης. Ολόκληρο το σώμα μπορεί να απολαύσει πλήρες μασάζ από το κεφάλι έως τους μηρούς.


## Λειτουργίες

---

- Το προϊόν είναι εξοπλισμένο με την έξυπνη λειτουργία ελέγχου και αναγνώρισης φωνής.
- Υπάρχει διαθέσιμο σύστημα αναπαραγωγής μουσικής. Τα συστήματα ήχου 3D είναι ενσωματωμένα στα αριστερά και δεξιά άνω χέρια. Η λειτουργία Bluetooth της έξυπνης συσκευής μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ασύρματη αναπαραγωγή μουσικής.
- Η λειτουργία ασύρματης φόρτισης κινητού είναι διαθέσιμη στο πλήκτρο συντόμευσης στο αριστερό υποβραχιόνιο. Το κινητό τηλέφωνο μπορεί να τοποθετηθεί στο σημείο ασύρματης φόρτισης.
- Το αριστερό υποβραχιόνιο είναι εξοπλισμένο με Αυτόματο Πλήκτρο (Automatic Key), Πλήκτρο Ενεργοποίησης Φωνητικού Ελέγχου (Voice Control Wake-up key) (αυτό το πλήκτρο είναι αποδοτικό μόνο όταν ο μοχλός φωνητικού ελέγχου στο χειριστήριο είναι ενεργοποιημένος), Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Θέρμανσης (Heating On/Off), Πλήκτρο Ανασήκωσης Κάτω Ποδιού (Lower Leg Up key), Πλήκτρο Χαμίλωσης Κάτω Ποδιού (Lower Leg Down key), Πλήκτρο Κατάκλισης (Linkage Lying key), Πλήκτρο Ανάκλισης (Linkage Up key), Πλήκτρο έντασης περιστροφής 3D οδηγών μασάζ (3D Massage Manipulation Intensity rotation button), Πλήκτρο Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης (Παύσης) [On/Off (Pause) key].
- Στους αερόσακους για την αριστερή και δεξιά παλάμη, υπάρχει η λειτουργία ήπιου μασάζ με μαγνητική θεραπεία.
- Λειτουργία μασάζ έκτασης ποδιών: τα κάτω πόδια και η πλάτη μπορούν να ανασηκωθούν και να χαμηλώσουν για αυτόματη κατάκλιση, καθώς και για αυτόματη κυκλική κατάκλιση. Παράλληλα, οι αερόσακοι ποδιών και οι οδηγοί πλάτης συνεργάζονται ταυτοχρόνως μεταξύ τους για μασάζ και τα πόδια μπορούν να εκταθούν για μασάζ.
- Αυτό το προϊόν είναι εξοπλισμένο με λειτουργία μασάζ Kneading Ποδιών: οι λειτουργίες μασάζ kneading και πίεσης αερόσακων παρέχονται στο υποπόδιο για να ανακουφίσουν από τη δυσκαμψία ή την ένταση των μυών των ποδιών που προκαλείται από την παρατεταμένη ορθοστασία.
- Αυτό το προϊόν είναι εξοπλισμένο με το ήπιο μασάζ εις βάθος ιστών για τη γάμπα: Μπορεί να ανακουφίσει την κόπωση, πίεση και πόνο των μυών των γαμπών, να προάγει αποτελεσματικά την κυκλοφορία του αίματος, να κάνει μασάζ στους μεσημβρινούς, να βελτιώσει αποτελεσματικά την δυσκαμψία ή ένταση των μυών των ποδιών και να ανακουφίσει το τοπικό πρήξιμο και να αποκαταστήσει τη ζωτικότητα.
- Η πολυθρόνα μασάζ είναι εξοπλισμένη με ανεξάρτητη λειτουργία ανοδικής/καθοδικής ρύθμισης στο υποπόδιο και την πλάτη, την λειτουργία ρύθμισης ανάκλισης/κατάκλισης της πλάτης και της λειτουργίας ρύθμισης γωνίας της αυτόματης, μηδενικής βαρύτητας, κατάκλισης.
- Η λειτουργία μασάζ ποδιών με κυλίνδρους είναι διαθέσιμη στα άκρα των ποδιών. 3 σετ κυλίνδρων κύλισης για μασάζ στην βάση των δακτύλων των ποδιών. Στην καμπύλη του ποδιού είναι διαθέσιμο μασάζ κύλισης και εις βάθος ιστών. Υπάρχουν 3 επίπεδα ρύθμισης ταχύτητας.
- Το υποπόδιο είναι εξοπλισμένο με λειτουργία ρύθμισης, έτσι ώστε η ανάκλιση και η κατάκλιση να είναι εφικτές και για το άνω και για το κάτω μέρος των ποδιών. Όταν απομακρύνετε τα πόδια σας από τα πεντάλ, τα πόδια θα ανασηκωθούν (στην αντίθεση κατεύθυνση των ποδιών) παράλληλα με την έκταση των ποδιών. Το μήκος της έκτασης των ποδιών εξαρτάται από το μήκος των ποδιών του χρήστη. Το μήκος επέκτασης των ποδιών είναι το μισό του μήκους έκτασης των ποδιών και η ανάσυρση των ποδιών και των ποδιών εξαρτάται από τη δύναμη του ελατηρίου.
- Τα υποβραχιόνια (αριστερό & δεξί) είναι εξοπλισμένα με ατμοσφαιρικές λάμπες LED.
- Διατίθενται λειτουργίες όπως ο τερματισμός, η αυτόματη καθιστή θέση και η αυτόματη επαναφορά του οδηγού.
- Το προϊόν διαθέτει απομακρυσμένο τηλεχειριστήριο με έγχρωμη οθόνη TFT.

# Λειτουργία Χειριστήριου

---

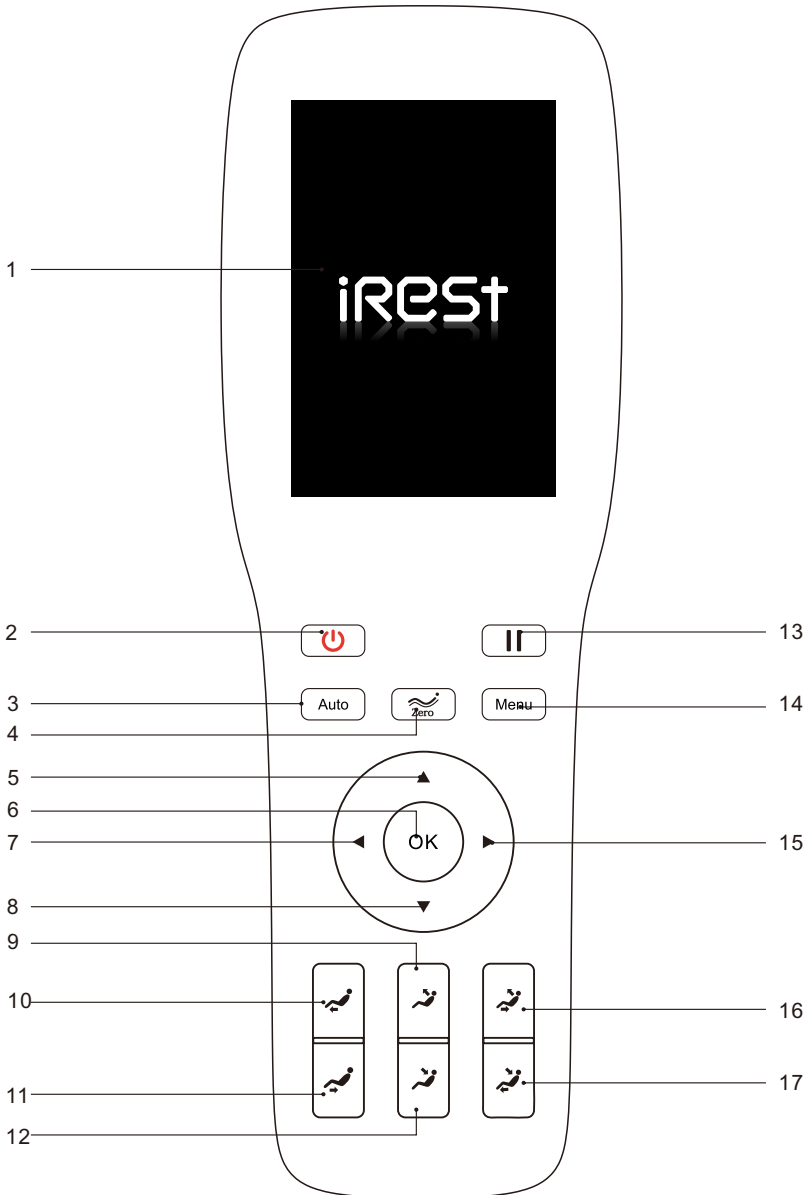

## Λειτουργία Χειριστηρίου

---

### 1. Οθόνη:

·Εγχρωμη οθόνη TFT με χρώματα LCD, εμφανίζει τις λειτουργίες μασάζ στην τρέχουσα κατάσταση.

### 2. Πλήκτρο Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης:

·Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε το μασάζ.

### 3. Πλήκτρο ΑΥΤΟ:

·Εισάγεστε στην επιφάνεια επιλογής αυτόματης λειτουργίας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργίες, ανατρέξτε στη Σελίδα 16 για τις Οδηγίες Λειτουργίας.

### 4. Πλήκτρο Zero-Gravity (Μηδενικής Βαρύτητας):

·Ρυθμίστε την γωνία της πολυθρόνας μασάζ για μηδενική βαρύτητα. Υπάρχουν συνολικά 4 λειτουργίες για να επιλέξετε (πχ. το 1ο πάτημα είναι το Επίπεδο 1, το 2ο πάτημα είναι το Επίπεδο 2, το 3ο πάτημα είναι το Επίπεδο 3 και το 4ο πάτημα επαναφέρει την πολυθρόνα στην αρχική της κατάσταση).

### 5. Πλήκτρο Πάνω:

·Πλήκτρο πλοήγησης επάνω: επιλέξτε μια λειτουργία προς τα πάνω στο μενού ή προσαρμόστε τη θέση μασάζ προς τα πάνω.

### 6. Πλήκτρο ΟΚ:

·Επιβεβαιώστε την επιλεγμένη λειτουργία μασάζ.

### 7. Πλήκτρο Αριστερά:

·Πλήκτρο Αριστερής Πλοήγησης: επιστρέψτε στο προηγούμενο μενού ή επιλέξτε μια λειτουργία στα αριστερά.

### 8. Πλήκτρο Κάτω:

·Πλήκτρο πλοήγησης κάτω: επιλέξτε μια λειτουργία προς τα κάτω στο μενού ή προσαρμόστε τη θέση μασάζ προς τα κάτω.

### 9. Πλήκτρο Ανασθήκωσης Πλάτης:

·Ρυθμίστε την πλάτη προς τα πάνω σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες μασάζ για την πιο άνετη στάση μασάζ.

### 10. Πλήκτρο Ανασθήκωσης Υποποδίου:

·Ρυθμίστε το υποπόδιο προς τα πάνω σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες μασάζ για την πιο άνετη στάση μασάζ.

### 11. Πλήκτρο Επαναφοράς Υποποδίου:

·Ρυθμίστε το υποπόδιο προς τα κάτω σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες μασάζ για την πιο άνετη στάση μασάζ.

### 12. Πλήκτρο Κατάκλισης Πλάτης:

·Ρυθμίστε την πλάτη προς τα κάτω σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες μασάζ για την πιο άνετη στάση μασάζ.

### 13. Πλήκτρο Παύσης:

·Κάντε παύση όλων των λειτουργιών μασάζ που βρίσκονται σε λειτουργία. Πιέστε εκ νέου το πλήκτρο αυτό για να συνεχίσετε όλες τις λειτουργίες μασάζ που βρίσκονταν σε λειτουργία πριν την παύση.

### 14. Πλήκτρο Menu:

·Εισάγεστε στην επιφάνεια του κυρίως μενού επιλογής. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργίες, ανατρέξτε στην Σελίδα 15 για τις Οδηγίες Λειτουργίας.

### 15. Πλήκτρο Δεξιά:

·Πλήκτρο Δεξιάς Πλοήγησης: επιστρέψτε στο προηγούμενο μενού ή επιλέξτε μια λειτουργία στα δεξιά.

### 16. Πλήκτρο Ανάκλισης:

·Σύμφωνα με την απαιτούμενη γωνία μασάζ, ρυθμίστε ταυτόχρονα την ανάκλιση της πλάτης και του υποποδίου, για την πιο άνετη θέση μασάζ.


### 17. Πλήκτρο Κατάκλισης:

·Σύμφωνα με την απαιτούμενη γωνία μασάζ, ρυθμίστε ταυτόχρονα την κατάκλιση της πλάτης και του υποποδίου, για την πιο άνετη θέση μασάζ.


# Τρόπος Χρήσης

## I. Ενεργοποίηση παροχής ενέργειας:


- 1 Συνδέστε το φις στην πρίζα

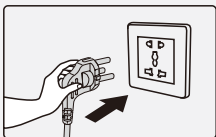

- 2 Συνδέστε το καλώδιο στην πολυθρόνα

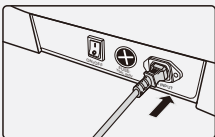

- 3 Ανοίξτε το διακόπτη της πολυθρόνας

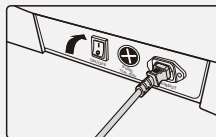

## II. Χειρισμός Τηλεχειριστηρίου Λειτουργιών Μασάζ:


### 1. Αναμονή

- Μετά την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της πολυθρόνας μασάζ, το τηλεχειριστήριο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής (πχ. ο LED φωτισμός είναι απενεργοποιημένος) και δεν μπορεί να εκτελέσει καμία λειτουργία (εκτός του πλήκτρου ενεργοποίησης/απενεργοποίησης).



### 2. Εκκίνηση Μασάζ (πλήκτρο ενεργοποίησης)


- Πιέστε το πλήκτρο ενεργοποίησης για να ξεκινήσετε το μασάζ. Εισάγεστε στην οθόνη εκκίνησης. Η πλάτη θα διατηρήσει την προεπιλεγμένη της θέση και το υποπόδιο θα ανασηκωθεί ελαφρώς. Αναμείνετε απλώς για οποιαδήποτε από τις αυτόματες λειτουργίες μασάζ να εμφανιστεί στην επιφάνεια επιλογής αυτόματων λειτουργιών. Εάν δεν επιλεγεί καμία "ΑΥΤΟ" (αυτόματη) λειτουργία εντός 5 λεπτών, η πολυθρόνα μασάζ θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.

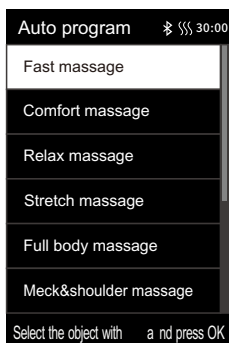

## Τρόπος Χρήσης


### 1) Ρύθμιση γωνίας κατάκλισης

- Αφού επιλέξετε οποιαδήποτε αυτόματη λειτουργία, οι θέσεις της πλάτης και του υποποδίου θα ρυθμιστούν στις προεπιλεγμένες γωνίες.
- Αφού ρυθμιστεί η γωνία, η πολυθρόνα μασάζ θα εκτελέσει αυτόματα την ανίχνευση θέσεως ώμου και σχήματος σώματος. Αναμείνατε την ολοκλήρωση αυτής της ανίχνευσης (εναλλακτικά, πιέστε "OK" για να παραλείψετε το βήμα αυτό).

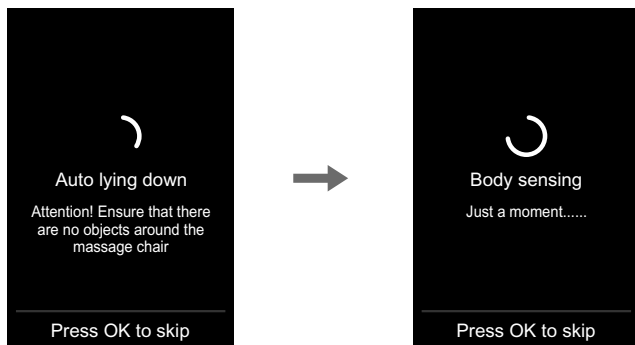



### 2) Ρύθμιση θέσης ώμων


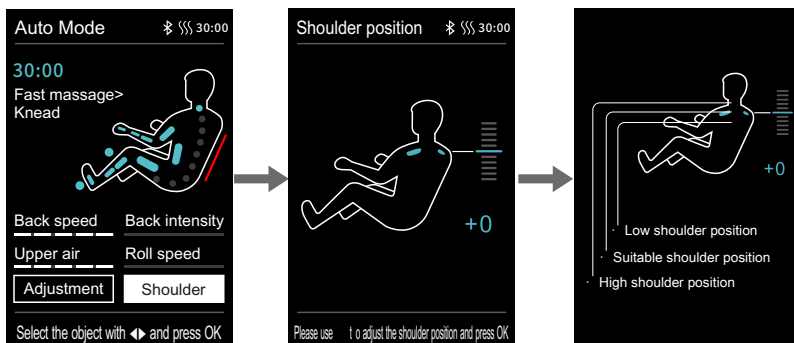
- Μόλις ανιχνευθεί η θέση ώμων θα ακουστεί ήχος κουδουνίσματος. Εάν υπάρχει οποιαδήποτε διαφορά από την πραγματική θέση των ώμων, ρυθμίστε την σωστή θέση, πιέζοντας τα πλήκτρα "UP" ή "DOWN". Η θέση του ώμου έχει 11 ρυθμιζόμενα επίπεδα. Εάν δεν υπάρχει ρύθμιση της θέσης των ώμων εντός 10 δευτερολέπτων, η λειτουργία μασάζ θα ξεκινήσει αυτόματα. Πιέστε "OK" για να απευθείας για να ξεκινήσει αμέσως το μασάζ. Εάν δεν εντοπιστεί θέση ώμων, το μασάζ θα ξεκινήσει σύμφωνα με το προεπιλεγμένο ύψος ώμων. Σημείωση: Κατά τη διάρκεια του μασάζ, στην επιφάνεια πληροφοριών, μπορείτε να πιέσετε το Δεξί Πλήκτρο για να επιλέξετε το μενού "Shoulder Adjustment" (Ρύθμιση Ωμων) και έπειτα να πιέσετε "OK" για να εισαχθείτε στην επιφάνεια ρύθμισης ώμων. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα Πάνω ή Κάτω για να ρυθμίσετε την θέση των ώμων.



## Τρόπος Χρήσης

Πλήκτρο	Περιγραφή
	Μετακινήστε τις σφαίρες μασάζ προς τα πάνω για μια πιο σωστή θέση ώμων
	Μετακινήστε τις σφαίρες μασάζ προς τα κάτω για μια πιο σωστή θέση ώμων

- Αν χρειαστεί να ρυθμίσετε την θέση των ώμων αφού έχει ήδη ξεκινήσει το πρόγραμμα μασάζ, μπορείτε να επιλέξετε απευθείας "Shoulder Position Adjustment" για να μπειτε στην επιφάνεια ρύθμισης θέσης ώμων. Εκεί μπορείτε να πιέσετε τα πλήκτρα "Up Key" ή "Down Key" για να ρυθμίσετε το ύψος της θέσης ώμων. Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού μπορείτε να πιέσετε το πλήκτρο "Left Button" ή να περιμένετε 10 δευτερόλεπτα για να μεταφερθείτε αυτόματα στην επιφάνεια πληροφοριών.

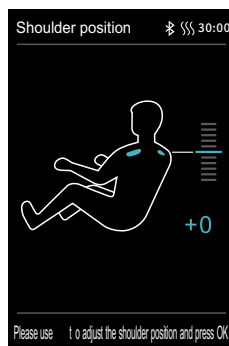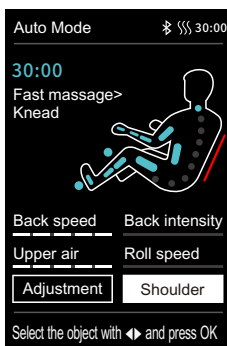


### 3) Ρύθμιση Θέσης μασάζ

- Αφού μπειτε σε ένα πρόγραμμα μασάζ, αν χρειαστεί να ρυθμίσετε την θέση μασάζ, μπορείτε να πιέσετε το πλήκτρο "Menu" στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε να μπειτε στη χειροκίνητη λειτουργία ("Manual Function"). Μπορείτε να επιλέξετε οποιαδήποτε από τις χειροκίνητες λειτουργίες και έπειτα να πιέσετε το πλήκτρο "Left Button" για να επιστρέψετε στην επιφάνεια πληροφοριών (η επιφάνεια πληροφοριών θα μετατραπεί σε επιφάνεια χειροκίνητης λειτουργίας).
- Στην επιφάνεια χειροκίνητης λειτουργίας, εάν το εύρος μασάζ εμφανίζει ένα συγκεκριμένο σημείο ή μια τοπική περιοχή, μπορείτε να πιέσετε απευθείας τα πλήκτρα "Up Key" ή "Down Key" για να ρυθμίσετε αντίστοιχα τους οδηγούς.
- Στην επιφάνεια χειροκίνητης λειτουργίας, εάν το εύρος μασάζ δεν εμφανίζει ένα συγκεκριμένο σημείο ή μια τοπική περιοχή, πρέπει να επιλέξετε να μπειτε στην Ρύθμιση Μασάζ ("Massage Adjustment") και έπειτα να επιλέξετε το "Massage Range" (Εύρος Μασάζ), έπειτα να επιλέξετε ένα συγκεκριμένο σημείο ή μια τοπική περιοχή και να πιέσετε το πλήκτρο "Left Button" για να επιστρέψετε στην επιφάνεια πληροφοριών. Έπειτα, θα χρειαστεί να πιέσετε τα πλήκτρα "Up Key" ή "Down Key" για να ρυθμίσετε τον οδηγό προς τα πάνω ή προς τα κάτω.




## Τρόπος Χρήσης

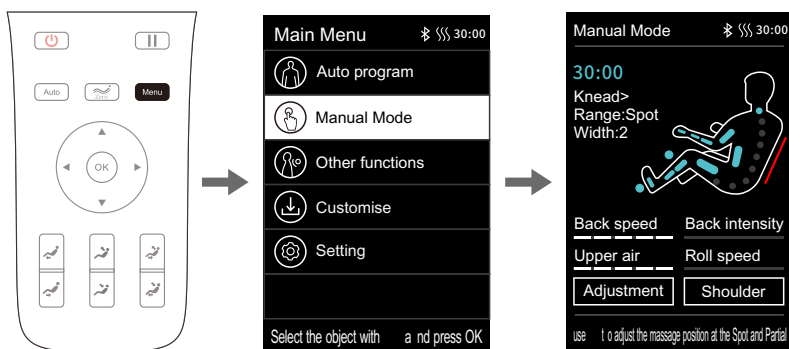

Σημείωση: Δεν μπορείτε να ρυθμίσετε την θέση μασάζ, όταν η πολυθρόνα βρίσκεται σε λειτουργία αυτόματου προγράμματος.

### 3. Πλήκτρο Παύσης


- Κατά τη διάρκεια μιας λειτουργίας μασάζ, πιέστε το πλήκτρο παύσης για να σταματήσετε προσωρινά όλες τις λειτουργίες μασάζ. Πιέστε εκ νέου το πλήκτρο παύσης για να συνεχίσετε τη λειτουργία μασάζ από εκεί που είχατε σταματήσει. Αν ο χρόνος παύσης ξεπεράσει τα 20 λεπτά, όλες οι λειτουργίες μασάζ θα απενεργοποιηθούν αυτόματα.

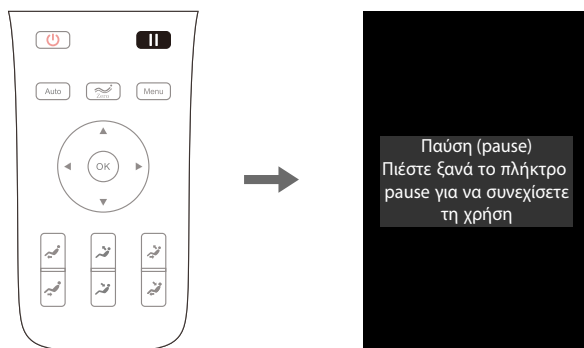

### 4. Πλήκτρο Μενού (Menu)


- Πιέστε το Πλήκτρο Μενού "Menu Button" για να μπειτε στην επιφάνεια επιλογής λειτουργίας μασάζ του κυρίως μενού, συμπεριλαμβανομένης της αυτόματης λειτουργίας, χειροκίνητης λειτουργίας, έξυπνης αποθήκευσης, ρύθμισης γωνίας, ρυθμίσεων και άλλων επιφανειών λειτουργιών.
- Μπείτε στην επιφάνεια μενού. Πιέστε τα πλήκτρα "Up Key" ή "Down Key" για να επιλέξετε λειτουργία. Επιβεβαιώστε με "OK" για να περάσετε στο επόμενο επίπεδο επιλογής. Πιέστε το πλήκτρο "Left Button" για να επιστρέψετε στην προηγούμενη επιφάνεια μενού.

## Τρόπος Χρήσης

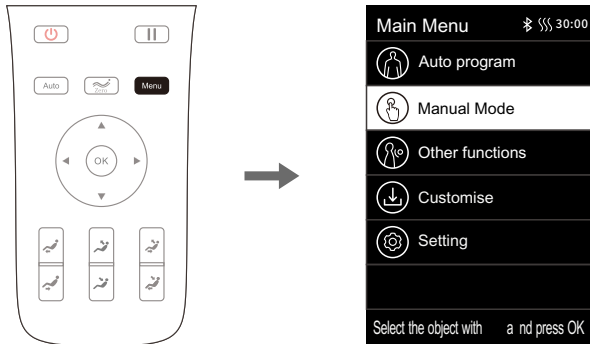

### 1) Αυτόματη λειτουργία (κυρίως μενού-αυτόματη λειτουργία)

- Πιέστε το Πλήκτρο "Menu Button" για να μπειτε στην επιφάνεια του κυρίως μενού. Πιέστε τα πλήκτρα "Up Key" ή "Down Key" για να επιλέξετε τις αυτόματες λειτουργίες. Πιέστε "OK" (ή πιέστε το πλήκτρο "AUTO" απευθείας στην επιφάνεια πληροφοριών) για να μπειτε στις επιλογές αυτόματων λειτουργιών.
- Είναι διαθέσιμες 21 ειδικές αυτόματες λειτουργίες μασάζ: fast massage(γρήγορο μασάζ), comfort massage(χαλαρό μασάζ), relaxing massage (χαλαρωτικό μασάζ), stretching massage, full body massage (μασάζ ολόκληρου του σώματος), neck and shoulder massage (μασάζ αυχένα & ώμου), back & waist massage (massage πλάτης & μέσης), full airbag massage (πλήρες μασάζ αερόσακων), Stress relieving (μασάζ ανακούφισης από το στρες), Energy (μασάζ ενέργειας), Good-night sleep (μασάζ βελτίωσης ύπνου), Joint care (μασάζ φροντίδας αρθρώσεων), Spine massage (μασάζ σπονδυλικής στήλης), Office regimen (μασάζ αποσυμφόρησης καθιστικής εργασίας), Sport recovery (μασάζ αθλητικής αποθεραπείας), Neck & shoulder care (μασάζ φροντίδας αυχένα & ώμου), Brain refresh (μασάζ αναζωογόνησης εγκεφάλου), Spine care (μασάζ φροντίδας σπονδυλικής στήλης), Waist care (μασάζ φροντίδας μέσης), Leg care (μασάζ φροντίδας ποδιών) και Rejuvenation (μασάζ αναζωογόνησης).
- Μπείτε στην επιφάνεια αυτόματων λειτουργιών. Πιέστε τα πλήκτρα "Up Key" ή "Down Key" για να επιλέξετε οποιαδήποτε αυτόματη λειτουργία προγράμματος μασάζ. Θα γίνει αυτόματα επιστροφή στην επιφάνεια πληροφοριών, η οποία θα εμφανίζεται ως η επιφάνεια πληροφοριών αυτόματης λειτουργίας.

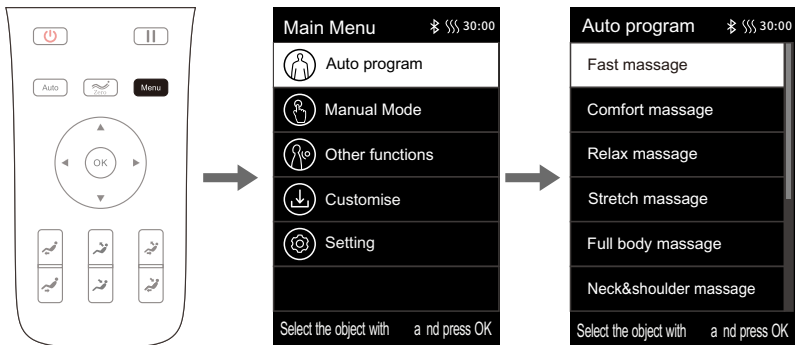

## Τρόπος Χρήσης

Λειτουργία	Περιγραφή
Fast massage	Δοκιμάστε γρήγορα όλα τα εφέ μασάζ.
Comfortable massage	Η πιο άνετη εμπειρία μασάζ.
Relaxing massage	Απαλό και άνετο βαθύ μασάζ για να ανακουφίσει την κούραση του σώματός σας και να το χαλαρώσει.
Stretching massage	Τεντώστε τα πόδια και τη μέση σας μέσα από το στήριγμα ποδιών και την πλάτη για να αφαιρέσετε αποτελεσματικά την κούραση, να ανακουφίσετε τον πόνο στις αρθρώσεις και να αποκαταστήσετε τη ζωτικότητα.
Full body massage	Βαθύ μασάζ για να αναζωογονήσετε το σώμα σας.
Neck & shoulder massage	Με τη μοναδική τεχνική μασάζ για τον αυχένα και τον ώμο, το αποτελεσματικό μασάζ για την αυχενική μοίρα της σπονδυλικής στήλης και την ωμοπλάτη μπορεί να πραγματοποιηθεί για να ανακουφίσει τον πόνο και να μειώσει την κούραση στον αυχένα και τους ώμους.
Back & waist massage	Εστιάστε στο μασάζ πλάτης και μέσης για να ανακουφίσετε τον πόνο στα σημεία αυτά.
Full airbag massage	Εστιάστε στο μασάζ ολόκληρου του σώματος με αερόσακο, για να επιτύχετε πλήρη χαλάρωση, βαθύ μασάζ σώματος και για να ανακουφίσετε πλήρως την κούραση και τον πόνο από το σώμα σας.
Stress Relieving	Αποκαταστήστε ολόκληρου το σώματος από την κούραση και τον πόνο. Επιτυγχάνεται χαλάρωση, βελτίωση της μικροκυκλοφορίας και γρήγορη ανακούφιση της κούρασης για την πλάτη και τα άκρα.
Energy	Μετά από μία ξεκούραστη νύχτα, το σώμα σας ξεκουράστηκε; Πραγματοποιήστε μασάζ στους μύες ολόκληρου του σώματος, ώστε να "ζυπνήσουν" γρήγορα όλες οι λειτουργίες του σώματός σας και ξεκινήσετε με ζωντάνια την ημέρα σας.
Good-night Sleep	Μέσω του μασάζ για τα δώδεκα κύρια σημεία βελονισμού για την υγειονομική περίθαλψη, το μασάζ αυτό βοηθά το σώμα να προσαρμόσει την ισορροπία και να βελτιώσει γρήγορα τον ύπνο σας και την ποιότητά του.
Joint Care	Φροντίστε την υγεία όλων των άκρων και των αρθρώσεων σας πιέζοντας, τραβώντας, τεντώνοντας και με άλλους τρόπους μασάζ.
Neck & shoulder care	Με τη μοναδική τεχνική μασάζ για τον αυχένα και τον ώμο, το αποτελεσματικό μασάζ για την αυχενική μοίρα της σπονδυλικής στήλης και την ωμοπλάτη μπορεί να εκτελεσθεί για να ανακουφίσει τον πόνο στον αυχένα και τους ώμους και να βελτιώσει την παροχή αίματος στον εγκέφαλο.

## Τρόπος Χρήσης


Spine Massage	Βελτίωση κύφωσης και στήθους. Μαλάξεις για κάθε σπόνδυλο. Φροντίδα για την υγεία της σπονδυλικής στήλης και βελτίωση της προεξοχής του μεσοσπονδύλου δίσκου.
Office Regimen	Για καθιστικές εργασίες όπου παραμένετε καθιστοί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αυτή η λειτουργία μπορεί να αυξήσει τη σωματική άσκηση με μασάζ και να βελτιώσει τις λειτουργίες του σώματος.
Sport Recovery	Πραγματοποιήστε γρήγορη αποθεραπεία, έπειτα από σωματική κούραση κατόπιν άσκησης.
Brain Refresh	Ανακουφίστε τον πόνο στον αυχένα και τους ώμους. Προωθήστε την παροχή αίματος στον εγκέφαλο κάνοντας μασάζ στα σημεία YUZHEN και DAZHU.
Spine Care	Φροντίστε για την υγεία της σπονδυλικής σας στήλης και πραγματοποιήστε βελτιώσεις στο σώμα σας για την έλλειψη άσκησης.
Waist Care	Εστιάστε στη βελτίωση της υγείας της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης και στην ανακούφιση της ακαμψίας των μυών της μέσης.
Legs Care	Ανακουφίστε γρήγορα τον πόνο των κάτω άκρων και τη μυϊκή κόπωση.
Rejuvenation	Βελτιώστε την ποιότητα του ύπνου σας και την αποτελεσματικότητα της εργασίας σας.

Σημείωση: Οι αυτόματες λειτουργίες σε υπηρεσία που έχουν ήδη επιλεγεί θα εμφανίζονται στη γραμμή κατάστασης λειτουργίας μασάζ.

### 2) Χειροκίνητη λειτουργία (κυρίως μενού-αυτόματη λειτουργία)

- Πιέστε το πλήκτρο "Menu Button" για να περάσετε στην επιφάνεια του κυρίως μενού. Πιέστε τα πλήκτρα "Up Key" ή "Down Key" για να επιλέξετε την χειροκίνητη λειτουργία και πιέστε "OK" για να περάσετε στην επιφάνεια χειροκίνητης λειτουργίας.
- 11 διαθέσιμες τεχνικές/λειτουργίες χειροκίνητου μασάζ: OFF (απενεργοποίηση), Kneading, Tapping I, Tapping II, ταυτόχρονο Kneading και Tapping, Shiatsu I, Shiatsu II, Shoulder Lifting (ανασήκωση ώμου), 3D I, 3D II, 3D III, 3D IV, κλπ.
- Αφού περάσετε στην επιφάνεια χειροκίνητης λειτουργίας, πιέστε τα πλήκτρα "Up Key" ή "Down Key" για να επιλέξετε την απαιτούμενη τεχνική χειροκίνητου μασάζ. Πιέστε "OK" για επιβεβαίωση (υπάρχουν 7 λειτουργίες kneading, πιέστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης για κυκλική εναλλαγή). Έπειτα από την επιλογή τεχνικής, δεν θα επιστρέψετε αυτόματα στην επιφάνεια πληροφοριών. Πιέστε το πλήκτρο "Left Button" για να επιστρέψετε στην προηγούμενη επιφάνεια. Αφού επιστρέψετε στην επιφάνεια πληροφοριών, θα παρατηρήσετε ότι έχετε περάσει στην επιφάνεια πληροφοριών της χειροκίνητης λειτουργίας.

## Τρόπος Χρήσης

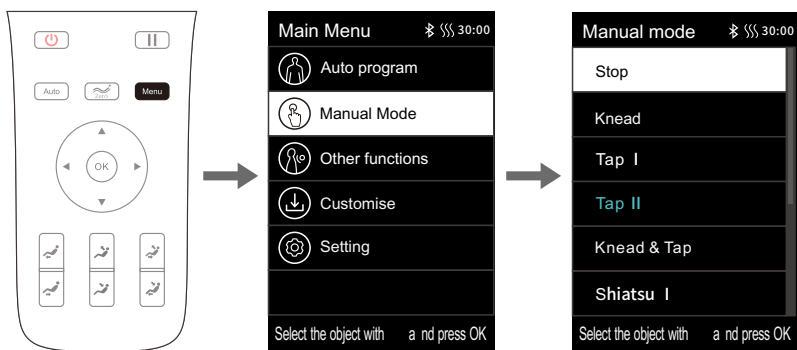


Λειτουργία	Περιγραφή	
Kneading	Ταχύτητα	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 ρυθμιζόμενα επίπεδα ταχύτητας</li> <li>• 5 ρυθμιζόμενα επίπεδα ταχύτητας</li> </ul>
Tapping	Ταχύτητα, πλάτος	
Simultaneous kneading and tapping	Ταχύτητα	
Shiatsu	Ταχύτητα, πλάτος	
Shoulder lifting	Ταχύτητα	
3D	Ταχύτητα, πλάτος	

Σημείωση: Στην τεχνική μασάζ 3D, το πλάτος του προγράμματος 3D I και 3D II δεν μπορεί να ρυθμιστεί. Το πλάτος των προγραμμάτων 3D III και 3D IV μπορεί να ρυθμιστεί.

### 3) Λοιπές Λειτουργίες (πλήκτρο κυρίως μενού-λοιπές λειτουργίες)


- Πιέστε το πλήκτρο "Menu Button" για να περάσετε στην επιφάνεια του κυρίως μενού. Πιέστε τα πλήκτρα "Up Key" ή "Down Key" για να επιλέξετε τα εικονίδια άλλων λειτουργιών. Πιέστε "OK" για να περάσετε στις επιφάνειες οποιασδήποτε άλλης λειτουργίας.
- Οι λοιπές λειτουργίες περιλαμβάνουν: μασάζ αερόσακων για το άνω μέρος του σώματος, μασάζ αερόσακων για το κάτω μέρος του σώματος, θέρμανση πλάτης, Kneading ποδιών και άλλες λειτουργίες μασάζ.
- Αφού περάσετε στην επιφάνεια άλλων λειτουργιών, πιέστε τα πλήκτρα "Up Key" ή "Down Key" για να επιλέξετε λειτουργία μασάζ. Αφού επιλέξετε κάποια από τις λειτουργίες, πιέστε το πλήκτρο "Right Button" για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε την λειτουργία. Έπειτα πιέστε "OK" για επιβεβαίωση. Πιέστε το πλήκτρο "Left Button" για να επιστρέψετε στην επιφάνεια του προηγούμενου μενού.

## Τρόπος Χρήσης

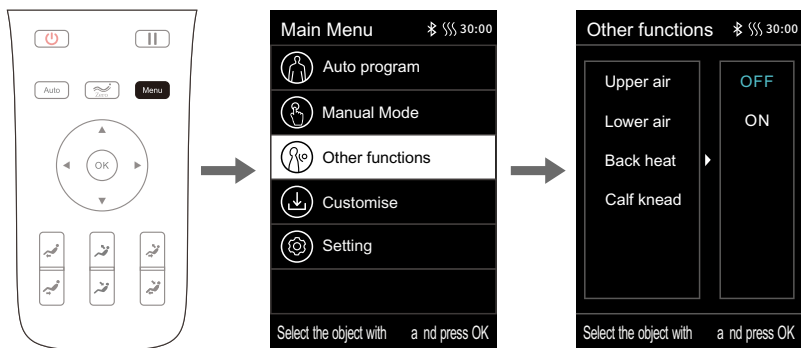

### 01) Λοιπές Λειτουργίες - μασάζ αερόσακων για το άνω μέρος του σώματος


- Μασάζ αερόσακων για το άνω μέρος του σώματος: συμπεριλαμβανομένων μασάζ αερόσακων για ώμους, χέρια, μέση και άλλες λειτουργίες μασάζ αερόσακων.
- Περάστε σε άλλη επιφάνεια λειτουργίας. Πιέστε τα πλήκτρα "Up Key" ή "Down Key" για να επιλέξετε την λειτουργία μασάζ αερόσακων για το άνω μέρος του σώματος. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο "Right Button" για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε την λειτουργία μασάζ αερόσακων για το άνω μέρος του σώματος. Έπειτα πιέστε το πλήκτρο "OK" για επιβεβαίωση. Πιέστε το πλήκτρο "Left Button" για να επιστρέψετε στην επιφάνεια του προηγούμενου μενού.

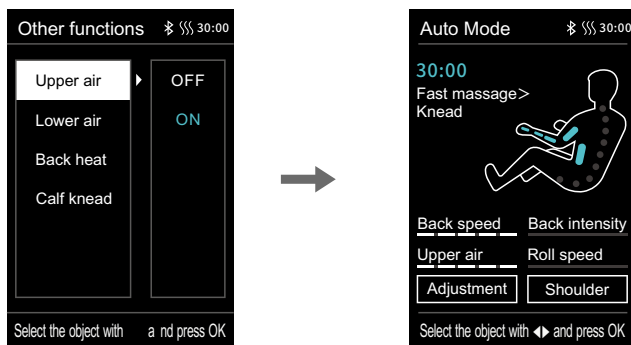

### 02) Λοιπές Λειτουργίες - μασάζ αερόσακων για το κάτω μέρος του σώματος


- Μασάζ αερόσακων για το κάτω μέρος του σώματος: συμπεριλαμβανομένων μασάζ αερόσακων άνω πόδια, κάτω πόδια, κλπ.
- Περάστε σε άλλη επιφάνεια λειτουργίας. Πιέστε τα πλήκτρα "Up Key" ή "Down Key" για να επιλέξετε την λειτουργία μασάζ αερόσακων για το κάτω μέρος του σώματος. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο "Right Button" για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε την λειτουργία μασάζ αερόσακων για το κάτω μέρος του σώματος. Έπειτα πιέστε το πλήκτρο "OK" για επιβεβαίωση. Πιέστε το πλήκτρο "Left Button" για να επιστρέψετε στην επιφάνεια του προηγούμενου μενού.

## Τρόπος Χρήσης

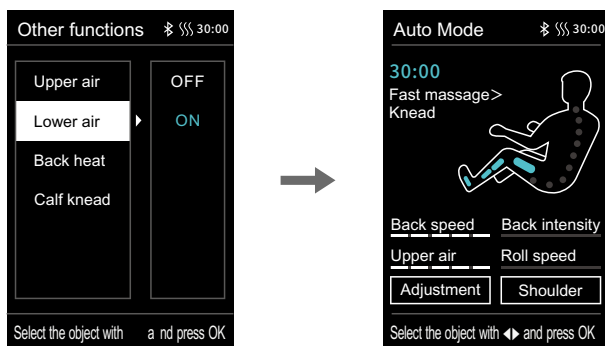

### 03) Λοιπές Λειτουργίες - Θέρμανση πλάτης

- Θέρμανση πλάτης: ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την λειτουργία θέρμανσης πλάτης. Η πλάτη θα γίνει πιο θερμή έπειτα από θέρμανση 3 λεπτών.
- Περάστε σε άλλη επιφάνεια λειτουργίας. Πιέστε τα πλήκτρα "Up Key" ή "Down Key" για να επιλέξετε την λειτουργία θέρμανσης πλάτης. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο "Right Button" για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε την λειτουργία αυτή. Έπειτα πιέστε το πλήκτρο "OK" για επιβεβαίωση. Πιέστε το πλήκτρο "Left Button" για να επιστρέψετε στην επιφάνεια του προηγούμενου μενού.

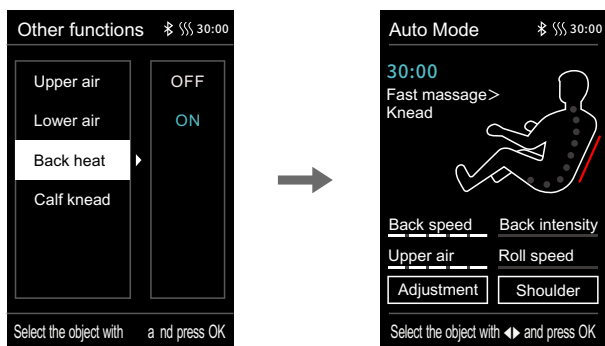


### 04) Λοιπές Λειτουργίες - Kneading (ζυμώματα) ποδιών

- Kneading (ζυμώματα) ποδιών: ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την λειτουργία Kneading ποδιών.

Περάστε σε άλλη επιφάνεια λειτουργίας. Πιέστε τα πλήκτρα "Up Key" ή "Down Key" για να επιλέξετε την λειτουργία Kneading ποδιών. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο "Right Button" για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε την λειτουργία αυτή. Έπειτα πιέστε το πλήκτρο "OK" για επιβεβαίωση. Πιέστε το πλήκτρο "Left Button" για να επιστρέψετε στην επιφάνεια του προηγούμενου μενού.


## Τρόπος Χρήσης

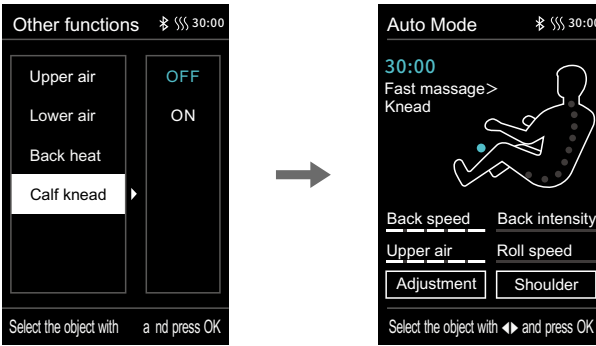

### 4) Έξυπνη Αποθήκευση (κυρίως μενού - έξυπνη αποθήκευση)

- Πιέστε το πλήκτρο "Menu Button" για να περάσετε στην επιφάνεια μενού. Πιέστε τα πλήκτρα "Up Key" ή "Down Key" για να επιλέξετε το εικονίδιο έξυπνης αποθήκευσης. Πιέστε "OK" για να περάσετε στην επιφάνεια έξυπνης αποθήκευσης, που συμπεριλαμβάνει: κλήση έξυπνης αποθήκευσης, αποθήκευση ή ακύρωση καταχώρησης έξυπνης αποθήκευσης και άλλες λειτουργίες αποθήκευσης.
- Η κλήση/επιλογή έξυπνης αποθήκευσης περιλαμβάνει: M1, M2, M3, M4 & M5.
- Η αποθήκευση έξυπνης αποθήκευσης περιλαμβάνει: M1, M2, M3, M4 & M5.
- Κλήση/Επιλογή (Call): Καλέστε την αποθηκευμένη λειτουργία μασάζ, τεχνική μασάζ, λειτουργία αερόσακων και ένταση υπό την τρέχουσα κατάσταση, τις θέσεις και τις γωνίες του στηρίγματος ποδιών και της πλάτης, και άλλες λειτουργίες μασάζ.
- Αποθήκευση (Storage): Αποθηκεύστε την λειτουργία μασάζ, τεχνική μασάζ, λειτουργία αερόσακων και ένταση υπό την τρέχουσα κατάσταση, τις θέσεις και τις γωνίες του στηρίγματος ποδιών και της πλάτης, και άλλες λειτουργίες μασάζ.
- Ακύρωση (Cancellation) είναι η επιλογή εξόδου.

Σημείωση: Κατά την αποθήκευση της μεθόδου μασάζ, μπορείτε να σχολιάσετε τη αποθηκευμένη λειτουργία και μέθοδο μασάζ (πχ. πατέρα, μητέρα, γιος, κόρη, ή κανένας).

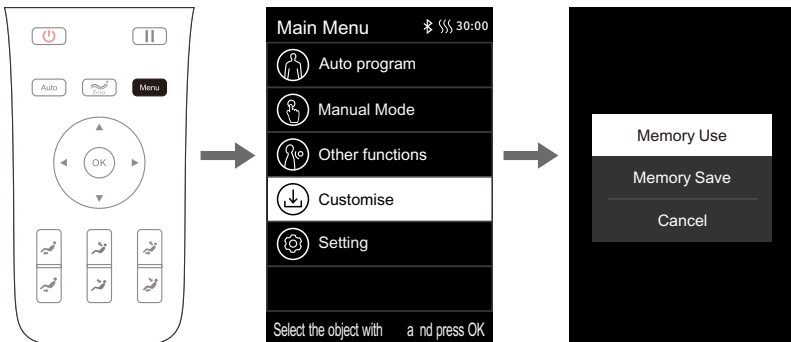




## Τρόπος Χρήσης

### 01) Έξυπνη αποθήκευση - αποθήκευση ή ακύρωση


- Μασάζ αερόσακων για το κάτω μέρος του σώματος: συμπεριλαμβανομένων μασάζ αερόσακων άνω πόδια, κάτω πόδια, κλπ.
- Περάστε σε άλλη επιφάνεια λειτουργίας. Πιέστε τα πλήκτρα "Up Key" ή "Down Key" για να επιλέξετε την λειτουργία μασάζ αερόσακων για το κάτω μέρος του σώματος. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο "Right Button" για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε την λειτουργία μασάζ αερόσακων για το κάτω μέρος του σώματος. Έπειτα πιέστε το πλήκτρο "OK" για επιβεβαίωση. Πιέστε το πλήκτρο "Left Button" για να επιστρέψετε στην επιφάνεια του προηγούμενου μενού.

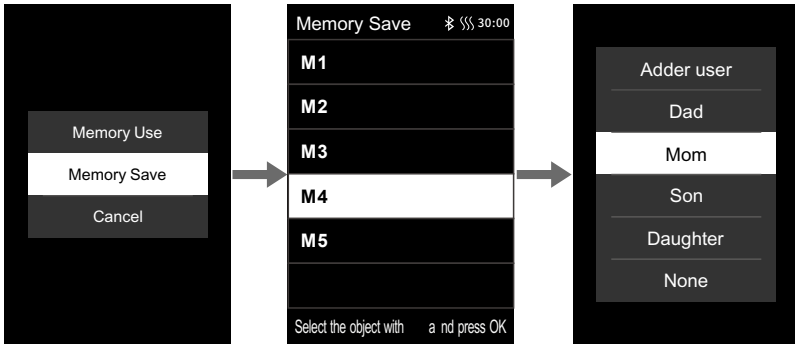

Σημείωση: Μπορείτε να σχολιάσετε (ονοματίσετε) τις αποθηκευμένες λειτουργίες και τεχνικές μασάζ (πχ. Πατέρας (Dad), Μητέρα (Mom), Γιος (Son), Κόρη (Daughter) ή Κανένας (None)).

### 02) Έξυπνη αποθήκευση - επιλογή ή ακύρωση


- Αφού εισαχθείτε στην επιλογή έξυπνης αποθήκευσης, πιέστε τα πλήκτρα "Up Key" ή "Down Key" για να επιλέξετε την λειτουργία μασάζ που επιθυμείτε να καλέσετε/επιλέξετε. Πιέστε "OK" για να κάνετε την κλήση/επιλογή ή ακύρωση.
- Εισαχθείτε στην επιλογή έξυπνης αποθήκευσης. Πιέστε τα πλήκτρα "Up Key" ή "Down Key" για να επιλέξετε οποιαδήποτε από τις αποθηκευμένες λειτουργίες M1-M5 που απαιτούνται για να καλέσετε/επιλέξετε το αποθηκευμένο πρόγραμμα μασάζ. Πιέστε το πλήκτρο "Left Button" για να επιστρέψετε στην προηγούμενη επιφάνεια μενού.

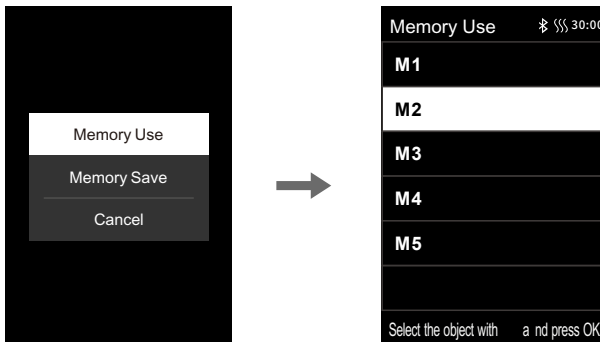

## Τρόπος Χρήσης


### 5) Ρυθμίσεις (Κυρίως Μενού - Ρυθμίσεις)

- Πιέστε το πλήκτρο "Menu Button" για να περάσετε στο επιφάνεια του κυρίως μενού. Πιέστε τα πλήκτρα "Up Key" ή "Down Key" για να επιλέξετε το εικονίδιο ρυθμίσεων. Πιέστε "OK" για να περάσετε στην επιφάνεια ρυθμίσεων.
- Οι ρυθμίσεις περιλαμβάνουν: ρυθμίσεις γλώσσας, ρυθμίσεις Bluetooth, έξυπνος φωνητικός έλεγχος, ID εξοπλισμού και άλλες λειτουργίες ρύθμισης.
- Αφού περάσετε στην επιφάνεια ρυθμίσεων, πιέστε τα πλήκτρα "Up Key" ή "Down Key" για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία ρύθμισης. Επιλέξτε οποιαδήποτε από τις λειτουργίες ρύθμισης και έπειτα πιέστε το πλήκτρο "Right Button" για να ορίσετε τις επιλεγμένες λειτουργίες ρύθμισης. Πιέστε το "OK" για επιβεβαίωση. Πιέστε το πλήκτρο "Left Button" για να επιστρέψετε στην προηγούμενη επιφάνεια μενού.

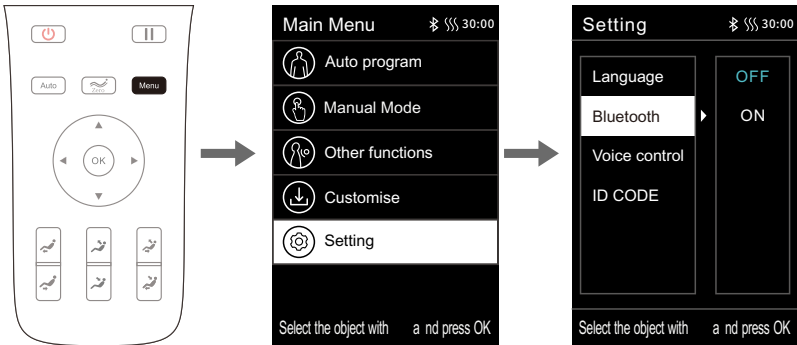

### 01) Ρυθμίσεις - ρυθμίσεις γλώσσας


- Φωνητικές Ρυθμίσεις: συμπεριλαμβάνονται κινέζικα και αγγλικά (η λειτουργία έχει μνήμη και έπειτα από μια τέτοια επιλογή, κατόπιν απενεργοποίησης και επανεκκίνησης της πολυθρόνας θα αναγνωρίζεται η τελευταία επιλεγμένη ρύθμιση).
- Πιέστε το πλήκτρο "Up Key" ή "Down Key" για να επιλέξετε την ρύθμιση γλώσσας. Πιέστε το πλήκτρο "Right Button" για να περάσετε στις ρυθμίσεις γλώσσας. Πιέστε "OK" για να επιλέξετε τα απαιτούμενα Απλοποιημένα Κινέζικα ή Αγγλικά. Πιέστε το πλήκτρο "Left Button" για να επιστρέψετε στην προηγούμενη επιφάνεια μενού.

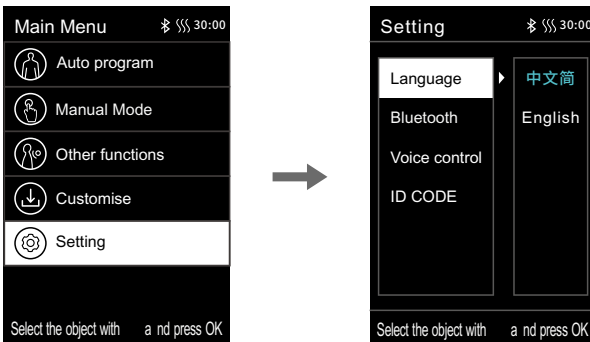

## Τρόπος Χρήσης


### 02) Ρυθμίσεις - Ρυθμίσεις Bluetooth

- Ρυθμίσεις Bluetooth (απενεργοποιημένο ως προεπιλογή): Κατόπιν ενεργοποίησης της λειτουργίας Bluetooth της πολυθρόνας, ο ήχος της Bluetooth-ενεργοποιημένης συσκευής πηγής (πχ. κινητό τηλέφωνο ή tablet κινητού διαδικτύου) μπορεί να συνδεθεί με τη μονάδα Bluetooth της πολυθρόνας μασάζ και η μουσική που αναπαράγεται από τη συσκευή πηγής ήχου μπορεί να μεταδοθεί ασύρματα στο ηχοσύστημα της πολυθρόνας μασάζ μέσω Bluetooth για αναπαραγωγή.
- Περάστε στην επιφάνεια ρυθμίσεων. Πιέστε τα πλήκτρα "Up Key" ή "Down Key" για να επιλέξετε τις ρυθμίσεις Bluetooth. Πιέστε το πλήκτρο "Right Button" για να μπειτε στην επιφάνεια ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (ON/OFF) Bluetooth. Πιέστε "OK" για να επιλέξετε το απαιτούμενο ON/OFF και έπειτα πιέστε το πλήκτρο "Left Button" για να επιστρέψετε στην προηγούμενη επιφάνεια μενού.

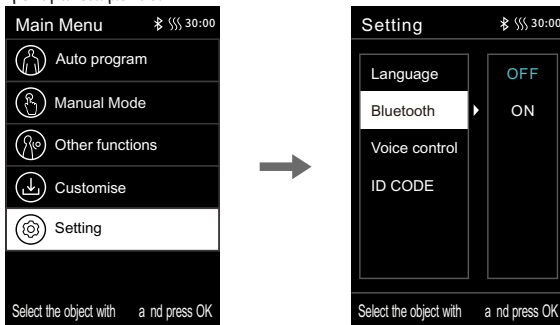

### 03) Έξυπνος Φωνητικός Έλεγχος


- Έξυπνος Φωνητικός Έλεγχος: ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την λειτουργία έξυπνου φωνητικού ελέγχου (η λειτουργία έχει μνήμη και έπειτα από μια τέτοια επιλογή, κατόπιν απενεργοποίησης και επανεκκίνησης της πολυθρόνας θα αναγνωρίζεται η τελευταία επιλεγμένη ρύθμιση). Σημείωση: Όταν ο έξυπνος φωνητικός έλεγχος είναι απενεργοποιημένος, η φωνητική ενεργοποίηση της πολυθρόνας δεν μπορεί να εκτελεστεί.
- Περάστε στην επιφάνεια ρυθμίσεων. Πιέστε τα πλήκτρα "Up Key" ή "Down Key" για να επιλέξετε την λειτουργία έξυπνου φωνητικού ελέγχου. Πιέστε το πλήκτρο "Right Button" για να περάσετε στις ρυθμίσεις έξυπνου φωνητικού ελέγχου. Πιέστε "OK" για να επιλέξετε το απαιτούμενο ON/OFF και έπειτα πιέστε το πλήκτρο "Left Button" για να επιστρέψετε στην προηγούμενη επιφάνεια μενού.

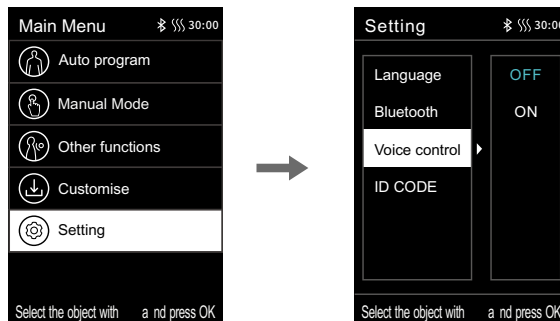

## Τρόπος Χρήσης


### 04) ID Εξοπλισμού

- ID Εξοπλισμού: Εμφανίζει τον αριθμό ID του παρόντος μηχανήματος.
- Περάστε στην επιφάνεια ρυθμίσεων. Πιέστε τα πλήκτρα "Up Key" ή "Down Key" για να επιλέξετε το ID Εξοπλισμού (Equipment ID) και να ελέγξετε τον αριθμό εξοπλισμού του παρόντος μηχανήματος.

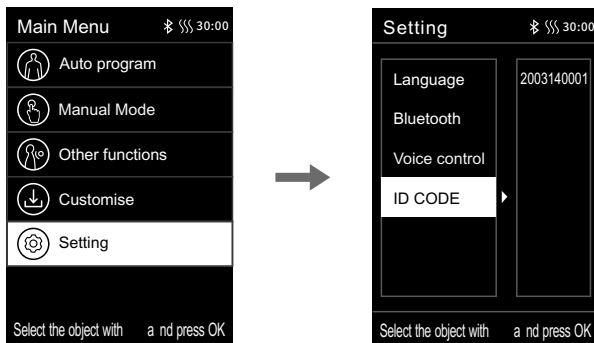

### 6) Ρύθμιση Μασάζ

- Στην κατάσταση επιφάνειας πληροφοριών πιέστε τα πλήκτρα "Left Button" ή "Right Button" για να επιλέξετε το πλήκτρο ρύθμισης μασάζ και πιέστε "OK" για να περάσετε στην επιφάνεια ρύθμισης μασάζ.
- Η ρύθμιση μασάζ περιλαμβάνει: δυνατότητα επιλογής 7 λειτουργιών ρύθμισης μασάζ, συμπεριλαμβανομένων: ταχύτητα μασάζ πλάτης, ένταση μασάζ πλάτης, εύρος μασάζ, πλάτος μασάζ, ένταση αερόσακων, ταχύτητα κυλίνδρων και χρόνος μασάζ.
- Αφού περάσετε στην επιφάνεια ρύθμισης μασάζ, πιέστε τα πλήκτρα "Up Key" ή "Down Key" για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία ρύθμισης μασάζ. Κατόπιν επιλογής οποιασδήποτε από τις επιθυμητές λειτουργίες ρύθμισης μασάζ, πιέστε το πλήκτρο "Right Button" για να περάσετε στην επιφάνεια επιλογής επιπέδου μασάζ. Έπειτα πιέστε το "OK" για να επιβεβαιώσετε το επιλεγμένο επίπεδο. Πιέστε το πλήκτρο "Left Button" για να επιστρέψετε στην προηγούμενη επιφάνεια μενού.

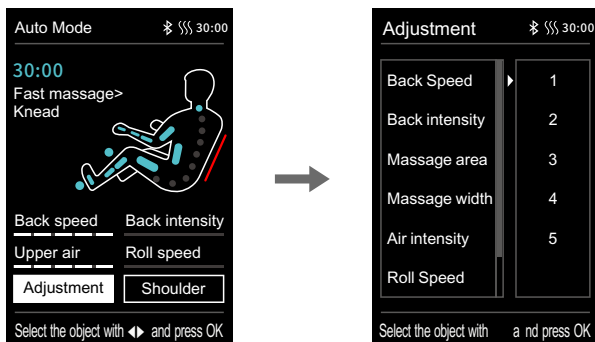

## Τρόπος Χρήσης

---

Λειτουργία	Περιγραφή
Ταχύτητα μασάζ πλάτης	5 ρυθμιζόμενα επίπεδα ταχύτητας
Ένταση μασάζ πλάτης	5 ρυθμιζόμενα επίπεδα έντασης
Εύρος μασάζ	Υπάρχουν 5 λειτουργίες για να επιλέξετε: συγκεκριμένο σημείο, τοπική περιοχή, πλήρη πλάτης, άνω πλάτη, κάτω πλάτη
Πλάτος μασάζ	5 ρυθμιζόμενα επίπεδα πλάτους
Ένταση αερόσακων	5 ρυθμιζόμενα επίπεδα έντασης
Ταχύτητα κυλίνδρων	Επιλέξτε από 4 λειτουργίες ανάμεσα σε OFF (απενεργοποίηση) και Επίπεδα 1-3
Χρόνος μασάζ	Επιλέξτε από 4 λειτουργίες ανάμεσα σε +10λεπτά, +5λεπτά, -5λεπτά, -10λεπτά

### Σημείωση:


- Σύμφωνα με τον εναπομείναντα χρόνο μασάζ, όταν ο εμφανιζόμενος χρόνος δεν επαρκεί για την προσθήκη ή μείωση ορισμένου χρόνου, η λειτουργία δεν θα μπορεί να εμφανιστεί (το ανώτατο όριο ένδειξης χρόνου είναι 40 λεπτά). Για παράδειγμα: αν η ένδειξη χρόνου του τηλεχειριστηρίου είναι 39 λεπτά, το εύρος ρύθμισης χρόνου θα είναι: -5λεπτά, -10λεπτά (δεν θα είναι δυνατή η εμφάνιση των επιλογών +5λεπτά, +10λεπτά).
- Η ρύθμιση της έντασης αερόσακων μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο όταν η λειτουργία αερόσακων ή αυτόματη λειτουργία είναι ενεργοποιημένη (για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς να ενεργοποιήσετε την λειτουργία αερόσακων, ανατρέξτε στην σελίδα 18 των Οδηγιών Χρήσης).

## 5. Πλήκτρο Μηδενικής-Βαρύτητας (Zero-Gravity)







- Πιέστε το πλήκτρο "Μηδενικής-Βαρύτητας" για να ρυθμίσετε την θέση Μηδενικής-Βαρύτητας. Μπορείτε να επιλέξετε διαφορετικές θέσεις γωνίας για Μηδενική-Βαρύτητα σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες (πχ. το 1ο πάτημα είναι το Επίπεδο 1, το 2ο πάτημα είναι το Επίπεδο 2, το 3ο πάτημα είναι το Επίπεδο 3 και το 4ο πάτημα επαναφέρει την πολυθρόνα μασάζ στην αρχική της κατάσταση).

## Τρόπος Χρήσης




Πλήκτρο	Περιγραφή
	Πλήκτρο Μηδενικής-Βαρύτητας: Μόλις πατηθεί, οι θέσεις του υποποδίου και της πλάτης μπορούν να ρυθμιστούν αυτόματα στις θέσεις για μηδενική βαρύτητα. Υπάρχουν 3 λειτουργίες μηδενικής-βαρύτητας και η κατακλινής απενεργοποιημένη (OFF) λειτουργία που μπορεί να εναλλαχθεί.

### 6. Πλήκτρο ρύθμισης κατακλινούς γωνίας

Πλήκτρο	Περιγραφή
	Πλήκτρο ανασήκωσης υποποδίου: Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο αυτό για να κάνετε το υποπόδιο να ανασηκωθεί σιγά. Ελευθερώστε το πλήκτρο για να σταματήσετε την κίνηση αυτή.
	Πλήκτρο επαναφοράς υποποδίου: Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο αυτό για να κάνετε το υποπόδιο να κατέβει σιγά. Ελευθερώστε το πλήκτρο για να σταματήσετε την κίνηση αυτή.
	Πλήκτρο ανασήκωσης πλάτης: Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο αυτό για να κάνετε την πλάτη να ανασηκωθεί σιγά. Ελευθερώστε το πλήκτρο για να σταματήσετε την κίνηση αυτή.
	Πλήκτρο χαμηλωσης πλάτης: Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο αυτό για να κάνετε την πλάτη να χαμηλώσει σιγά. Ελευθερώστε το πλήκτρο για να σταματήσετε την κίνηση αυτή.
	Πλήκτρο ανάκλισης: Πιέζοντας παρατεταμένα το πλήκτρο αυτό, η πλάτη θα ανασηκωθεί αργά και το υποπόδιο θα κατέβει αργά. Ελευθερώνοντας το πλήκτρο UP/DOWN η κίνηση της πλάτης και του υποποδίου θα σταματήσουν.
	Πλήκτρο κατάκλισης: Πιέζοντας παρατεταμένα το πλήκτρο αυτό, η πλάτη θα χαμηλώσει αργά και το υποπόδιο θα ανασηκωθεί αργά. Ελευθερώνοντας το πλήκτρο UP/DOWN η κίνηση της πλάτης και του υποποδίου θα σταματήσουν.


## Τρόπος Χρήσης

### III. Εισαγωγή στα Πλήκτρα Ελέγχου Υποβραχιόνιου

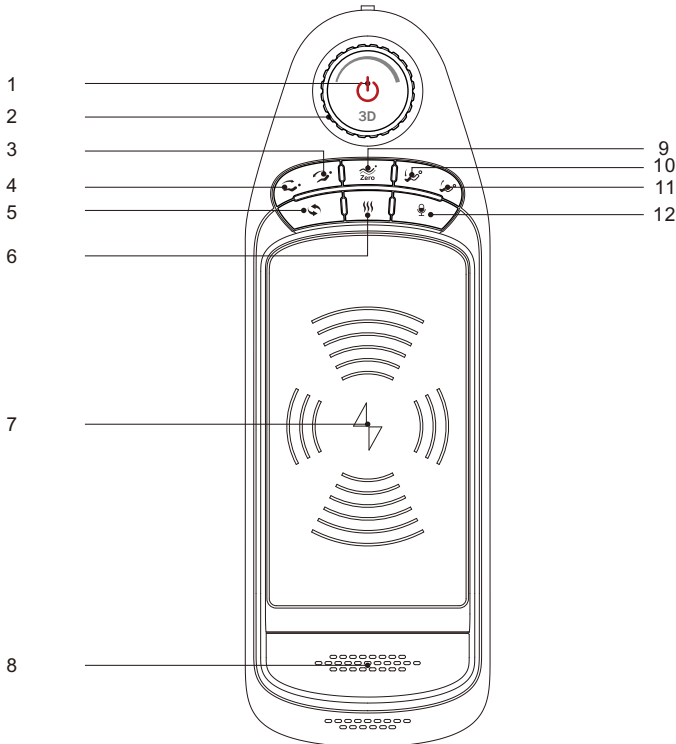

1. Πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (ON/OFF): Πιέστε παρατεταμένα για 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την πολυθρόνα μασάζ.
2. Πλήκτρο ρύθμισης έντασης 3D: Ρυθμίστε την ένταση μασάζ του οδηγού 3D.
3. Πλήκτρο Ανάκλισης: Ρυθμίστε την γωνία ανάκλισης.
4. Πλήκτρο Κατάκλισης: Ρυθμίστε την γωνία κατάκλισης.
5. Πλήκτρο Αυτοματισμού: Εναλλαγή από/προς την αυτόματη λειτουργία μασάζ.
6. Πλήκτρο Θέρμανσης: Ενεργοποιήστε/Απενεργοποιήστε την λειτουργία θέρμανσης πλάτης.
7. Ασύρματη φόρτιση: Ασύρματη φόρτιση κινητού
8. Μικρόφωνο φωνητικού ελέγχου: Ενσωματωμένο μικρόφωνο φωνητικού ελέγχου.
9. Πλήκτρο Μηδενικής-Βαρύτητας: Ρυθμίστε την πολυθρόνα στην γωνία μηδενικής βαρύτητας.
10. Πλήκτρο ανασήκωσης υποποδίου:Ρυθμίστε προς τα πάνω το υποπόδιο.
11. Πλήκτρο χαμήλωσης υποποδίου:Ρυθμίστε προς τα κάτω το υποπόδιο.
12. Πλήκτρο ενεργοποίησης φωνητικού ελέγχου: Πιέστε σύντομα το πλήκτρο αυτό για να ενεργοποιήσετε τον φωνητικό έλεγχο και παρατεταμένα για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την λειτουργία φωνητικού ελέγχου.

## Τρόπος Χρήσης

Πλήκτρο	Περιγραφή
	Πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης: Πιέστε σύντομα το πλήκτρο ON/OFF για να κάνετε παύση λειτουργίας. Η παρατεταμένη πίεση για 3 δευτερόλεπτα πραγματοποιεί ενεργοποίηση/απενεργοποίηση. Αν η παύση ξεπεράσει τα 20 λεπτά, όλες οι λειτουργίες μασάζ θα απενεργοποιηθούν αυτόματα.
	Μοχλός έντασης 3D: ρυθμίστε την ένταση μασάζ του οδηγού 3D (αριστερόστροφα υποδεικνύεται με "-" και δεξιόστροφα με "+"). Το εύρος έντασης είναι Επίπεδο 1-5.
	Πλήκτρο ανάκλισης: Πιέζοντας παρατεταμένα το πλήκτρο αυτό, η πλάτη θα ανασηκωθεί σιγά και το υποπόδιο θα χαμηλώσει σιγά. Ελευθερώνοντας το πλήκτρο αυτό οι αντίστοιχες κινήσεις θα σταματήσουν.
	Πλήκτρο κατάκλισης: Πιέζοντας παρατεταμένα το πλήκτρο αυτό, η πλάτη θα χαμηλώσει σιγά και το υποπόδιο θα ανασηκωθεί σιγά. Ελευθερώνοντας το πλήκτρο αυτό οι αντίστοιχες κινήσεις θα σταματήσουν.
	Πλήκτρο Αυτόματης Λειτουργίας: Πιέστε το για να επιλέξετε με εναλλαγή τις αυτόματες λειτουργίες μασάζ.
	Πλήκτρο θέρμανσης: Πιέστε το για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το την λειτουργία θέρμανσης.
	Πλήκτρο μηδενικής βαρύτητας (Zero-gravity): Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο αυτό, η θέση του υποποδίου και της πλάτης θα ρυθμίζεται αυτόματα στην θέση μηδενικής βαρύτητας. Υπάρχουν 3 λειτουργίες μηδενικής βαρύτητας που μπορούν να εναλλαχθούν κυκλικά.
	Πλήκτρο ανασήκωσης υποποδίου: Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο αυτό για να κάνετε το υποπόδιο να ανασηκωθεί σιγά. Ελευθερώστε το πλήκτρο για να σταματήσετε την κίνηση αυτή.
	Πλήκτρο επαναφοράς υποποδίου: Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο αυτό για να κάνετε το υποπόδιο να κατέβει σιγά. Ελευθερώστε το πλήκτρο για να σταματήσετε την κίνηση αυτή.
	Πλήκτρο ενεργοποίησης φωνητικού ελέγχου: Πιέστε το πλήκτρο αυτό για να ενεργοποιήσετε την λειτουργία φωνητικού ελέγχου και πιέστε παρατεταμένα για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την λειτουργία αυτή. Εάν δεν αναγνωριστεί φωνητική εντολή εντός 6 δευτερολέπτων, η λειτουργία φωνητικού ελέγχου απενεργοποιείται αυτόματα (το πλήκτρο αυτό λειτουργεί μόνο κατόπιν ενεργοποίησης της λειτουργίας φωνητικού ελέγχου).



## Τρόπος Χρήσης

### IV. Λειτουργία Φωνητικού Ελέγχου

- Όταν η πολυθρόνα έχει ενεργοποιηθεί ή είναι σε λειτουργία αναμονής (standby), λέγοντας ο χρήστης "Hi Alice" ή "Hey Alice" μπορεί να ενεργοποιήσει τη λειτουργία φωνητικού ελέγχου. Εναλλακτικά, μπορείτε να πιέσετε το πλήκτρο φωνητικού ελέγχου στο υποβραχιόνιο για να ενεργοποιήσετε την λειτουργία φωνητικού ελέγχου.
- Πιέστε παρατεταμένα για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την λειτουργία φωνητικού ελέγχου.
- Αφού η λειτουργία φωνητικού ελέγχου έχει ενεργοποιηθεί επιτυχώς, θα ακουστεί "I am here.". Στο σημείο αυτό και εφόσον έχει εντοπιστεί φωνητική εντολή εντός 6 δευτερολέπτων, αφού έχει ακουστεί η απάντηση από την πολυθρόνα massage θα ξεκινήσει η αντίστοιχη λειτουργία. Εάν δεν υπάρξει έγκυρη εντολή ή απόκριση σε έξι δευτερόλεπτα, η λειτουργία φωνητικού ελέγχου θα απενεργοποιηθεί αυτόματα και πρέπει να ενεργοποιηθεί ξανά.
- Σημείωση: Η Λειτουργία Φωνητικού Ελέγχου είναι διαθέσιμη μόνο στα Αγγλικά, ενώ για την ορθή λειτουργία των εντολών συμβουλευτείτε τον κάτωθι πίνακα.


Εντολή/Απόκριση Φωνητικού Ελέγχου		
Εντολή: "Hi Alice" ή "Hey Alice". Απόκριση: "I am here".		
No.	Εντολή	Απόκριση
1	Massage on	Απόκριση: Ok, massage on
2	Massage close	Απόκριση: Ok, massage close
3	Comfort Massage	Απόκριση: Ok, comfort massage
4	Relax massage	Απόκριση: Ok, relax massage
5	Full body massage	Απόκριση: Ok, full body massage
6	Neck and shoulder massage	Απόκριση: Ok, neck and shoulder massage
7	Back and waist massage	Απόκριση: Ok, back and waist massage
8	Stretch massage	Απόκριση: Ok, stretch massage
9	Open the air pressure	Απόκριση: Ok, open the air pressure
10	Close the air pressure	Απόκριση: Ok, close the air pressure
11	Up the seat position	Απόκριση: Ok, up the seat position
12	Down the seat position	Απόκριση: Ok, down the seat position
13	Change the other mode	Απόκριση: Ok, change the other mode
14	Go little down	Απόκριση: Ok, go little down
15	Go little up	Απόκριση: Ok, go little up

Σημείωση: Οι εντολές 14 και 15 μπορούν να χρησιμοποιηθούν μετά την χρήση της εντολής 13.

## Τρόπος Χρήσης

### V. Οδηγίες Λειτουργίας για Αναπαραγωγή σε Ηχείο Bluetooth (Speaker Play)

1. Μπείτε στο κύριο Μενού της έξυπνης συσκευής σας. Ανοίξτε την επιλογή "Settings" και επιλέξτε "Bluetooth" και αυτόματα θα γίνει αναζήτηση για νέες συσκευές Bluetooth για συζεύξη "Search for a New Bluetooth Device".
2. Η έξυπνη συσκευή θα αναζητήσει το αντίστοιχο μοντέλο Bluetooth (π.χ. IMCMXXX). Κάντε κλικ στο κουμπί "Match". Στην ερώτηση για σύζευξη με τη συσκευή, απλά επιλέγετε "Match" για να ολοκληρώσετε την αντιστοίχιση.
3. Ενεργοποιήστε το "Music Player" στην έξυπνη συσκευή και επιλέξτε το τραγούδι για αναπαραγωγή.

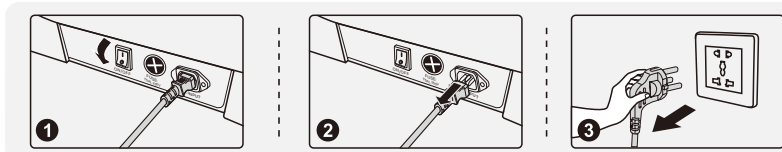

- 1 Διάγραμμα απενεργοποίησης προϊόντος
- 2 Διάγραμμα αποσύνδεσης
- 3 Διάγραμμα αφαίρεσης από παροχή ενέργειας



### VI. Απενεργοποίηση και Παύση του Μασάζ

- Αν κατά τη διάρκεια του μασάζ πατηθεί το πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης, όλες οι λειτουργίες μασάζ θα σταματήσουν αμέσως και η πλάτη, το υποπόδιο και οι οδηγοί της πολυθρόνας μασάζ θα επανέλθουν στις αρχικές τους θέσεις. Όταν εξαντληθεί ο προεπιλεγμένος χρόνος μασάζ, όλες οι λειτουργίες μασάζ θα απενεργοποιηθούν. Η πλάτη και το υποπόδιο δεν θα επανέλθουν στις αρχικές τους θέσεις.
- Απενεργοποιήστε το προϊόν και αφαιρέστε το από την παροχή ρεύματος, όπως απεικονίζεται στις προηγούμενες εικόνες-διαγράμματα.



### VII. Οδηγίες Τοποθέτησης Υποβραχιόνιων

1. Αποσυσκευάστε τις δύο συσκευασίες και αφαιρέστε τα εξαρτήματα της πολυθρόνας μασάζ και του υποβραχιόνιου. Συναρμολογήστε την πολυθρόνα μασάζ αφού ελέγξετε προσεκτικά και επιβεβαιώσετε ότι δεν υπάρχουν ζημιά με τα αξεσουάρ και την εμφάνιση της πολυθρόνας μασάζ. Θα πρέπει να έχετε το δικό σας κατσαβίδι σταυρωτής κεφαλής για την Συναρμολόγηση. Στη συνέχεια, επιλέξτε το επισημασμένο καλώδιο ρεύματος και το τηλεχειριστήριο από τη συσκευασία, τοποθετήστε πρώτα το χειριστήριο στην μπροστινή οπή του πλαισίου του καθίσματος στη δεξιά πλευρά της πολυθρόνας μασάζ και βιδώστε το σφιχτά (όπως απεικονίζεται στην Εικόνα 1). Στη συνέχεια συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και ενεργοποιήστε το προϊόν. Η πολυθρόνα μασάζ θα εισέλθει στην λειτουργία αυτόματη ανάκτησης. Αποσυνδέστε την πηγή τροφοδοσίας για ολοκλήρωση της συναρμολόγησης αφού η θέση πολυθρόνας αλλάξει σε όρθια κατάσταση αναμονής.
2. Σηκώστε το υποβραχιόνιο με τα δύο χέρια και στη συνέχεια τοποθετήστε το μπροστινό άγκιστρο του υποβραχιόνιου στο μπροστινό τετράγωνο άνοιγμα του πλαισίου της πολυθρόνας μασάζ (όπως απεικονίζεται στην Εικόνα 2).



## Τρόπος Χρήσης

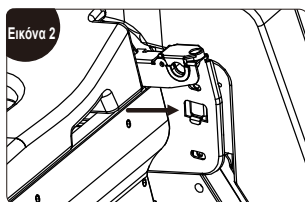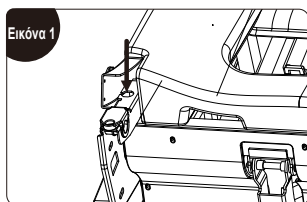

3. Κρεμάστε σταθερά το μπροστινό άκρο του υποβραχιονίου, έπειτα σηκώστε το πίσω άκρο του υποβραχιονίου και συνδέστε αντίστοιχα τον σωλήνα αέρα και την καλωδίωση στο πίσω άκρο του υποβραχιονίου με τον σωλήνα αέρα και την καλωδίωση στην αντίστοιχη υποδοχή στον χειριστήριο υποβραχιονίου (host)(ο σωλήνας αέρος προσδιορίζεται με διαφορετικά χρώματα και η καλωδίωση προσδιορίζεται σύμφωνα με τη διαφορά κεφαλής της καλωδίωσης)(Εικόνα 3).
4. Συνδυάστε μία βίδα κεφαλής Allen M8\*30 με μία μεγάλη ροδέλα Φ8, βιδώστε την στην ράβδο του χειριστήριου υποβραχιονίου (host), στην οπή στο πίσω μέρος του υποβραχιονίου και έπειτα τοποθετήστε το αντίστοιχο διακοσμητικό πώμα στο πίσω κάλυμμα (Εικόνα 4).

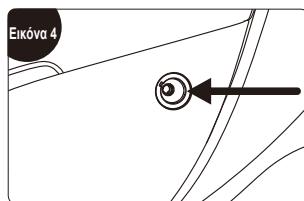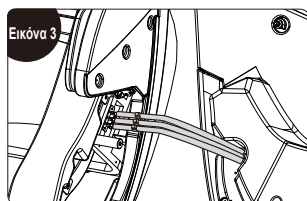


5. Πιέστε τον άνω βραχίονα προς τα κάτω, στο χαμηλότερο επίπεδο, όπου υπάρχει ένα κενό μεταξύ του άνω βραχίονα και της κάψουλας, έπειτα συνδυάστε μία βίδα κεφαλής Allen M6\*25 με μια επίπεδη ροδέλα και βιδώστε το υποβραχιόνιο στην κάψουλα (Εικόνα 5).
6. Στη συνέχεια, ενώστε το υποβραχιόνιο (στο σημείο όπου έχει εισαχθεί το μπροστινό άγκιστρο στο μπροστινό τετράγωνο στόμιο του πλαισίου της πολυθρόνας μασάζ στο δεύτερο βήμα) με βίδα σταυρωτής κεφαλής M6X16 και επίπεδη ροδέλα Φ5. Έπειτα βιδώστε το υποβραχιόνιο και το χειριστήριο υποβραχιονίου (host) στην εσωτερική πλευρά του μπροστινού άκρου του υποβραχιονίου (Εικόνα 6).

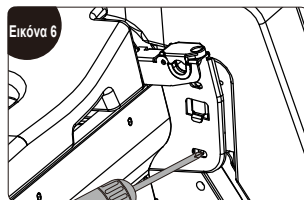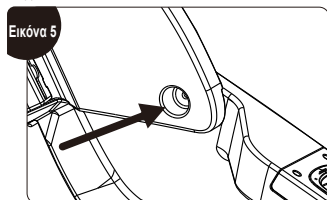


## Τρόπος Χρήσης

### VIII. Οδηγίες Τοποθέτησης Υποποδίου

- Αφού ενώσετε τα καλώδια και τον σωλήνα αέρος ανάμεσα στο υποπόδιο και την πολυθρόνα μασάζ, αφαιρέστε τους δετήρες καλωδίων και τοποθετήστε το συναρμολογημένο τμήμα μέσα στο κάθισμα (Εικόνα 1).
- Τοποθετήστε τους στρογγυλούς σωλήνες στην αριστερή και δεξιά πλευρά του υποποδίου πάνω στην βάση του υποποδίου (Εικόνα 2).

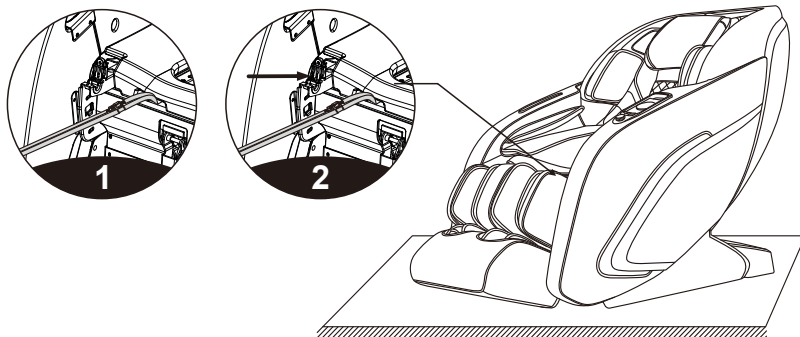


- Έπειτα, χρησιμοποιήστε το κάλυμμα τοποθέτησης του υποποδίου για να καλύψετε τους στρογγυλούς σωλήνες στις δύο πλευρές του υποποδίου (Εικόνα 3).
- Τοποθετήστε το υποπόδιο στην πολυθρόνα μασάζ με δύο βίδες M5 (μία σε κάθε πλευρά). Πριν την τοποθέτηση, ελέγξτε αν υπάρχει κάποια ανωμαλία (αναποδογουρίζοντας το υποπόδιο) ή αν κάποιος σωλήνας ή καλώδιο έχει διπλωθεί. Αν όλα φαίνονται σωστά, εγκαταστήστε το υποπόδιο (Εικόνα 4).

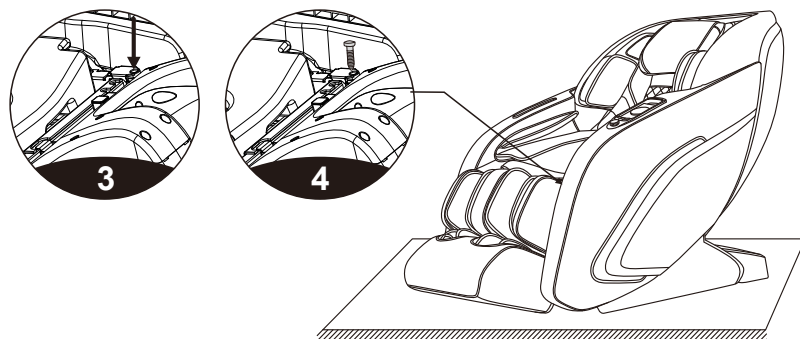

## Τρόπος Χρήσης


### ΙΧ. Οδηγίες Αφαίρεσης και Χρήσης Μαξιλαριού Κεφαλής και Πλάτης.

- Η χρήση του μαξιλαριού κεφαλής μπορεί να μειώσει της έντασης του kneading μασάζ στους ώμους και τον αυχένα. Μπορείτε να αποφασίσετε βάσει των ατομικών αναγκών σας εάν θα το χρησιμοποιήσετε ή όχι (η χρήση του μαξιλαριού συνίσταται). Το μαξιλάρι της πλάτης επισυνάπτεται με την πολυθρόνα με φερμουάρ (1). Το μαξιλάρι κεφαλής επισυνάπτεται με την πλάτη της πολυθρόνας με σύνδεση με άγκιστρο και θηλείας (2).

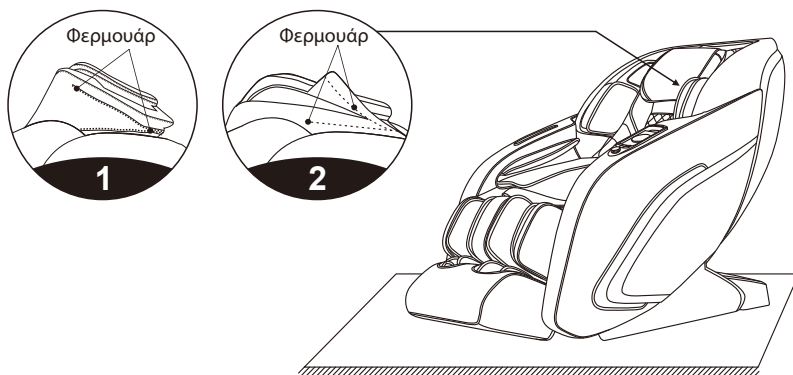

### Χ. Προστασία Δαπέδου.

- Η παρατεταμένη και αυξημένη πίεση της πολυθρόνας μασάζ μπορεί να προκαλέσει γρατζουνιές ή/και φθορές στο δάπεδο. Συνίσταται η τοποθέτηση μοκέτας (με χαμηλό πέλος) ή προστατευτικού δαπέδου προκειμένου να αποφευχθούν φθορές.

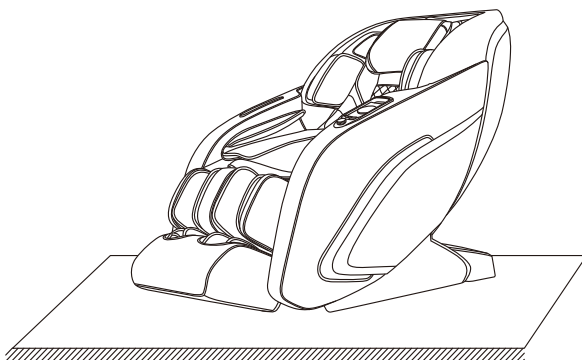

Σημείωση: Μην μετακινείτε την Πολυθρόνα μασάζ σε τραχειά επιφάνεια ή σε στενά μέρη. Για τη μεταφορά της Πολυθρόνας χρειάζονται τουλάχιστον δύο άτομα. Κατά την μεταφορά της, φροντίστε τα σημεία που θα την κρατήσετε με τα χέρια σας να είναι η πλάκα στεγανοποίησης του υποποδίου και οι αυλακώσεις του καλύμματος της πλάτης. (Μην ανασκώσετε απευθείας τους βραχίονες.)


## Τρόπος Χρήσης

---

### ΧΙ. Οδηγίες Μετακίνησης

- Όταν μετακινείτε την πολυθρόνα μασάζ, βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλώδια έχουν αφαιρεθεί από την επιφάνειά της. Για την μεταφορά της πολυθρόνας είναι απαραίτητη η συνεργασία 2 ατόμων. Ένα άτομο στο μπροστινό και ένα άτομο στο πίσω μέρος της πολυθρόνας. Το άτομο στο μπροστινό μέρος θα πρέπει να ανασηκώσει την πολυθρόνα, ενώ το άτομο στο πίσω μέρος θα πρέπει να την ωθήσει προς τα κάτω. Όταν το κέντρο βαρύτητας της πολυθρόνας μασάζ βρίσκεται πλήρως στους τροχούς βάσης, μπορείτε να ωθήσετε την πολυθρόνα μασάζ προς τα εμπρός σε μια κατάλληλη θέση και έπειτα, με ομαλές κινήσεις, να την επαναφέρετε στην κανονική της γωνία.

(Σημείωση: Προτού μετακινήσετε την πολυθρόνα, πρέπει να έχετε ήδη απενεργοποιήσει την πολυθρόνα από το διακόπτη και έπειτα να αφαιρέσετε το φινιρίσμα του καλωδίου παροχής ρεύματος από την πρίζα καθώς και τα καλώδια παροχής ρεύματος και του χειριτηρίου από την πολυθρόνα).

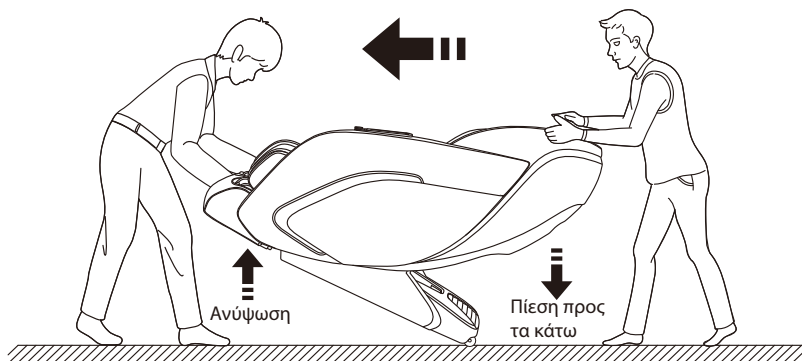

Προειδοποίηση: Οι ρόδες μεταφοράς της πολυθρόνας είναι κατάλληλες μόνο για αργή μετακίνηση και μικρή απόσταση εντός του χώρου σας. Για μεταφορά σε μεγαλύτερη απόσταση, θα χρειαστείτε άλλα βοηθητικά εργαλεία μεταφοράς.

## Προδιαγραφές Προϊόντος

---

Μοντέλο: SL-A602

Διαμόρφωση: 2

Όνομα: Πολυθρόνα Μασάζ

Τάση: 110-120V~ 60Hz

220-240V~ 50Hz/60Hz

Ισχύς: 150W

Μέγιστος Χρόνος Χρήσης: 20min

Δομή ασφαλείας: Class I

Περιγραφή υλικών: PVC, PA, ατσάλινα μέρη, ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά μέρη, σύνδεσμοι.

ΥΛΙΚΑ	PU	ΔΕΡΜΑ	ΥΦΑΣΜΑ	ΞΥΛΟ

## Περιορισμένη Εγγύηση

---

Οι πολυθρόνες μασάζ Life Care έχουν σχεδιαστεί, κατασκευαστεί και επιθεωρηθεί για να διασφαλίζουν την ποιότητα στη λειτουργία και την απόλαυση. Η εγγύηση κατασκευής περιορίζεται στα χαλύβδινα και συγκολλημένα με χάλυβα μέρη του πλαισίου. Αυτή η περιορισμένη εγγύηση καλύπτει αποκλειστικά κατασκευαστικά ελαττώματα.

### Εγγύηση και χρονική διάρκεια αυτής

Η ΜΕΚΜΑ Α.Ε. αναλαμβάνει να επισκευάσει το μηχάνημα δωρεάν σε περίπτωση βλάβης που οφείλεται αποκλειστικά σε σφάλμα κατασκευής. Η εγγύηση καλύπτει το κόστος των ανταλλακτικών και την εργασία αποκατάστασης της βλάβης.

Η χρονική διάρκεια της εγγύησης είναι: ΔΥΟ (2) έτη, και δεν παρατείνεται για οποιαδήποτε αιτία.

### Όροι εγγύησης

Απαιτείται απόδειξη αγοράς (πρωτότυπη απόδειξη) για όλες τις επισκευές ή σέρβις με εγγύηση.

Αποστολές προϊόντων χωρίς προηγούμενη συνεννόηση με την ΜΕΚΜΑ Α.Ε. δεν παραλαμβάνονται.

### Η παρούσα εγγύηση ισχύει μόνο εφ' όσον:

1. Επιδειχθεί από τον αγοραστή η νόμιμη απόδειξη αγοράς του μηχανήματος (Δελτίο Λιανικής Πώλησης) που αναφέρει την ημερομηνία αγοράς, τον τύπο του μηχανήματος και τον αριθμό κατασκευής serial number (αν υπάρχει). Οποσδήποτε αποκλείεται η μεταβίβαση της εγγύησης σε τρίτον.
2. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να καθορίζει αυτή και κατά την απόλυτη κρίση της την αντικατάσταση ή την επισκευή των ανταλλακτικών, καθώς επίσης, τον τρόπο, τον χρόνο και τον τρόπο επισκευής. Ρητώς αναφέρεται ότι αποκλείεται κάθε είδους απαίτηση για αποζημίωση, λόγω προσωρινής έλλειψης ανταλλακτικών και καθυστέρησης αποκατάστασης της βλάβης.

### Εκπλήρωση της εγγύησης

Όλες οι υπηρεσίες εγγύησης απαιτούν έγκριση και εξουσιοδότηση από την ΜΕΚΜΑ Α.Ε. Η επισκευή του μηχανήματος πραγματοποιείται στο τμήμα επισκευών της εταιρείας μας. Η μεταφορά του μηχανήματος προς και από το συνεργείο, γίνεται με ευθύνη και έξοδα του πελάτη. Για να ξεκινήσετε μια αξίωση για την Εγγύηση Life Care, απλώς καλέστε το τμήμα επισκευών της ΜΕΚΜΑ Α.Ε. Να είστε έτοιμοι να περιγράψετε το προϊόν που χρειάζεται σέρβις και τη φύση του προβλήματος. Απαιτείται απόδειξη αγοράς. Όλες οι επισκευές και οι αντικαταστάσεις πρέπει να έχουν εγκριθεί εκ των προτέρων. Οι επιλογές σέρβις, η διαθεσιμότητα ανταλλακτικών και οι χρόνοι απόκρισης θα διαφέρουν. Είστε υπεύθυνοι για την παράδοση και το κόστος παράδοσης του προϊόντος ή οποιονδήποτε εξαρτημάτων στο εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για αντικατάσταση, σύμφωνα με τις οδηγίες μας.

### Τι ΔΕΝ καλύπτεται:

Ζημιές κατά τη μεταφορά, κλοπή, κατάχρηση, παραμέληση, βανδαλισμός.



## Περιορισμένη Εγγύηση

---

Ζημιές που προκλήθηκαν λόγω αποστολής και χειρισμού, προϊόντα από πτώση, ακατάλληλη εγκατάσταση ή/και μη εξουσιοδοτημένες επισκευές δεν αποτελούν ελάττωμα σύμφωνα με την παρούσα εγγύηση.

Τροποποιήσεις ή αλλοιωμένες συνθήκες του αρχικού προϊόντος, ακατάλληλη χρήση ηλεκτρικού/τροφοδοτικού, ηλεκτρικές διαταραχές και υπερτάσεις ρεύματος. Δυσλειτουργίες λόγω ακατάλληλης χρήσης καθώς και αλόγιστης χρήσης ή συντήρησης, συμπεριλαμβανομένης της μη τήρησης των οδηγιών λειτουργίας.

Οποιοσδήποτε περιβαλλοντικές συνθήκες (παραδείγματα: πυρκαγιά, πλημμύρες, σκουριά, διάβρωση, άμμος, βρωμιά, ανεμοθύελλες, χαλάζι, σεισμοί και/ή ανεμοστρόβιλοι) ή οποιαδήποτε άλλη έκθεση σε καιρικές συνθήκες.

Αυτή η εγγύηση δεν περιλαμβάνει κανονική φθορά, του velcro, των φερμουάρ, ή εκδορών και προσαρτημένα σημεία στη ραφή, δεν αποτελούν ελάττωμα για την εγγύηση.

Αποσκλήρυνση/σκληρίνωση αφρού και σύνθετων υλικών πλήρωσης σε μαξιλάρια και μαξιλάρια. Η φθορά και το ξεθώριασμα των επενδύσεων δεν αποτελούν ελάττωμα βάσει αυτής της εγγύησης, καθώς αυτά τα είδη αλλάζουν φυσιολογικά με τη χρήση.

Τα φυσικά μοτίβα, οι κόκκοι και οι παραλλαγές στο δέρμα δεν θα αποτελούν ελάττωμα βάσει αυτής της εγγύησης, καθώς καμία επένδυση δεν είναι πανομοιότυπη.

Η εγγύηση δεν ισχύει εάν το προϊόν έχει υποστεί φυσική ζημιά, είτε εκ προθέσεως είτε λόγω ατυχήματος ή αμέλειας: συμπεριλαμβανομένων λεκέδων, υγρών, μούχλας, ζημιάς από νερό, ζημιάς από ζώα, κοψίματος, εγκαυμάτων.

Προϊόντα που χρησιμοποιούνται σε εμπορικούς ή εταιρικούς χώρους.

### Περιορισμοί και Εξαιρέσεις Εγγύησης

Οι εγγυήσεις δεν μεταβιβάζονται και δεν καλύπτουν οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια που προκαλείται από:

\* Χρήση σε εμπορικό ή εταιρικό περιβάλλον.

\* Μη τήρηση των οδηγιών λειτουργίας.

\* Ηλεκτρικές διαταραχές και υπερτάσεις ισχύος.

\* Πεσμένο προϊόν, συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς περιορισμό, τηλεχειριστηρίων

\* Ζημιά που προκύπτει από ακατάλληλη χρήση ή συντήρηση.

\* Βανδαλισμός, περιβαλλοντικές συνθήκες, έκθεση σε περιβαλλοντικές συνθήκες (σκουριά, διάβρωση, άμμος, βρωμιά, άνεμος, χαλάζι, σεισμός, ανεμοστρόβιλος, πυρκαγιά, πλημμύρα).

\* Απώλεια χρήσης κατά την περίοδο που το προϊόν επισκευάζεται.

\* Αλλοιώσεις ή τροποποιήσεις της αρχικής κατάστασης

\* Κλοπή, παραμέληση, μη εξουσιοδοτημένες επισκευές, απώλεια ισχύος.

Η ζημιά που προκλήθηκε λόγω αποστολής και χειρισμού δεν αποτελεί ελάττωμα βάσει αυτής της εγγύησης. Το ξεθώριασμα, η φθορά και το τρίψιμο των υφασμάτων δεν αποτελεί ελάττωμα βάσει της εγγύησης. Αστοχίες σημείων στερέωσης, όπως ραφή, Velcro και φερμουάρ, δεν αποτελούν ελάττωμα βάσει αυτής της εγγύησης.

Σε καμία περίπτωση η ΜΕΚΜΑ Α.Ε. ή οι εκπρόσωποί της δεν ευθύνονται για

## Περιορισμένη Εγγύηση

---

έμμεσες, επακόλουθες ή τυχαίες ζημιές (συμπεριλαμβανομένων των ζημιών για διαφυγόντα κέρδη, σωματικές βλάβες, ιατρικές και άλλα παρόμοια), ακόμη και αν κάποιο μέρος έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών.

Οι εγγυήσεις είναι μη μεταβιβάσιμες και θα είναι αντί για οποιαδήποτε άλλη εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένης αλλά χωρίς περιορισμό οποιασδήποτε σιωπηρής εγγύησης ή εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένη χρήση. Οι εγγυήσεις δεν ισχύουν για ενοικιαζόμενους, επαγγελματικούς, εμπορικούς, θεσμικούς ή άλλους μη οικιακούς χρήστες.

Οι εγγυήσεις ισχύουν, υπό την προϋπόθεση ότι ο εξοπλισμός έχει λειτουργήσει σύμφωνα με τις οδηγίες που τον συνοδεύουν. Όλες οι εγγυήσεις ξεκινούν την ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΓΟΡΑΣ. Δεν προσφέρεται κανένα δικαίωμα ή επέκταση για παράδοση ή/και εγκατάσταση. Η ΜΕΚΜΑ Α.Ε., κατά την απόλυτη κρίση της, θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει οποιοδήποτε ελαττωματικό εξάρτημα εντός εύλογου χρονικού πλαισίου.

Αν έχετε απαίτηση επισκευής σε κάποιο προϊόν, επικοινωνήστε με την ομάδα υποστήριξης της ΜΕΚΜΑ Α.Ε. στη διεύθυνση [service@mekma.gr](mailto:service@mekma.gr) ή στο 210 2758228 (εκτός αργιών). Πρέπει να γνωρίζετε το μοντέλο του προϊόντος και να περιγράψετε σωστά τη φύση του προβλήματος. Απαιτείται απόδειξη αγοράς. Οι επιλογές επισκευών, η διαθεσιμότητα ανταλλακτικών και οι χρόνοι απόκρισης θα διαφέρουν. Είστε υπεύθυνοι για την παράδοση και το κόστος παράδοσης του προϊόντος ή οποιονδήποτε εξαρτημάτων στο κέντρο επισκευών, σύμφωνα με τις οδηγίες μας.



**ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ**